

● Mepore® Film Roll

Den usterile, åndbare, transparente og selvklæbende filmbandage

Mepore Film Roll er en usteril, transparent og selvklæbende filmbandage, der er ideel til fiksering af bandager, slanger og kanyler. Mepore Film Roll er også udviklet til at forebygge nedbrydning af huden og til beskyttelse af skrøbelig hud mod vand og kontaminering.



* Mikrober større end 25 nm

Sådan virker Mepore Film Roll

Mepore Film Roll giver en fleksibel og transparent beskyttelse. Den former sig efter hudens konturer, og fungerer som en barriere mod lækage samt mod virus og bakteriel kontaminering.

Mepore Film Roll giver en let og blid fiksering af bandager, slanger og kanyler.

Mepore Film Roll opretholder et fugtigt sårmiljø, som følge af den høje permeabilitet. Mepore Film Roll tillader overskydende fugt at fordampe fra såret.

Anvendelsesområder

Mepore Film Roll kan anvendes til fiksering af bandager, slanger og kanyler. Mepore Film Roll er også udviklet til at forebygge nedbrydning af huden og til beskyttelse af skrøbelig hud.

Sådan anvendes Mepore Film Roll



Fjern den øverste del af beskyttelsespapiret markeret med "1"



Applicér Mepore Film Roll på det ønskede sted ved brug af beskyttelsespapiret. Sørg for at filmen er korrekt appliceret ved at udglatte den.



Fjern beskyttelsesfilmen ved at trække, hvor der er markeret med "2"



Fjern den hvide papirsidflap.

Fordele ved Mepore Film Roll

- Åndbar transparent film, muliggør udveksling af fugt, hvorved risikoen for maceration minimeres.
- Hudvenlig klæb, giver blid og sikker fiksering.
- Transparent film muliggør regelmæssig inspektion og påvisning af eventuelle komplikationer.
- Film med bakterie- og virusbarriere, minimerer risikoen for udefrakommende kontaminering.
- Brusetæt.
- Tynd og fleksibel film, som former sig efter hudens konturer. Optimerer brugen og patientkomforten.
- Beskyttelsespapir med afmærkede intervaller, som letter opmåling og klipning.
- Leveres på en plastkerne, som giver optimal håndtering af filmen og gør det lettere at opbevare filmen.

Forbehold

Mepore Film bør ikke appliceres på patienter, der er overfølsomme overfor klæbemidler af akryl.



Mepore Film Roll leveres usterilt i 10 m ruller på en praktisk og beskyttende plastkerne i dispenserbokse.

Art. nr.	Bredde cm	Stk/trp.krt.
276105	5	24
276110	10	12
276115	15	8

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf. 48 168 268
www.molnlycke.dk



Mölnlycke Health Care, navn og logo og Mepore® Film Roll er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.