

Mestopore® S

Absorberende bandage til kontinente stomier med blød selvklæbende silikone.

Mestopore S er en selvklæbende absorberende bandage med blød Safetac® silikone til kontinent stomi. Mestopore S minimerer risikoen for traume mod den omkringliggende hud samt minimerer smerte ved bandageskift.

Absorberende ikke-hæftende pude med lav partikelafgivelse. Giver en fortræffelig væskehåndtering og øget sikkerhed.

Åndbar nonwoven film uigennemtrængelig for væske


Safetac® blød silikone. Hæfter blidt til den tørre hud. Minimerer traume og smerte ved bandageskift.

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre traume. Mindre smerte.™

Safetac® er en patenteret blød silikone klæbeteknologi. Bandager med Safetac teknologi er atraumatiske ved aftagning. Bandagerne minimerer traume mod såret og den omkringliggende hud, og mindsker derved smerte hos patienten. Risikoen for maseration minimeres ved at bandagen forsejler sårkanterne.

Læs mere på: www.safetac.com

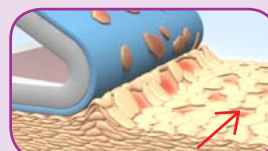

Stripping af hudceller med traditionel klæb

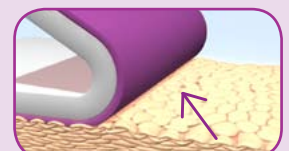

Ingen stripping af hudceller med Safetac

Sådan virker Mestopore S


Mestopore S er en selvklæbende absorberende bandage til kontinent stomi. Stomivævet beskyttes af et ikke-hæftende kontaktag. Stomisekret absorberes og fastholdes af den højabsorberende pude. Den selvklæbende kant er hudvenlig, selv ved hyppige bandageskift. Bagside filmen er beigefarvet, så bandagen ikke er så synlig på huden.

Filmens åndbarhed gør det muligt for huden at ånde. Bandagen klæber sikkert på tør hud og beskytter mod lækage.


Anvendelsesområde

Mestopore S er specielt udviklet til kontinente stomier.


Sådan anvendes Mestopore S

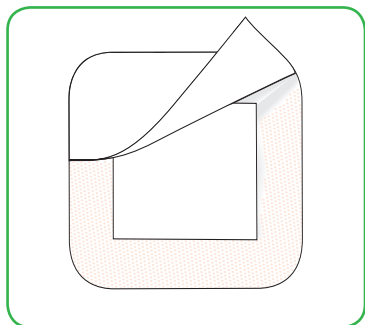

Fjern den øverste del af beskyttelses-papiret

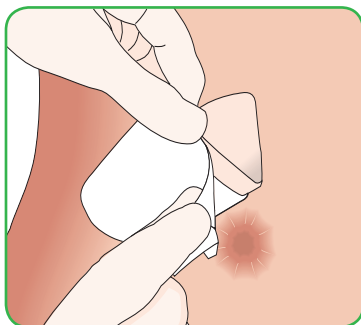

Applicer bandagen "på tør hud" ovenpå stomien. Fjern det resterende beskyttelsespapir.

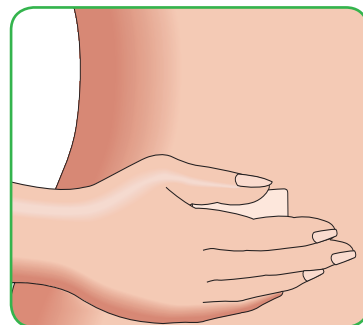

Ved bandageskift: løft forsigtigt og tag bandagen af.

Fordele ved Mestopore S

- Minimerer traume og smerte ved bandageskift
- Hudvenlig
- Former sig efter kroppens konturer
- Vandtæt (brusebad)
- Efterlader ingen klæberester
- Nem applicering

Bemærk

Ved klinisk tegn på infektion skal en læge kontaktes for korrekt behandling af infektionen.



Mestopore S leveres usterile i en beskyttende inderpakning

Art.nr.	Str. (cm)	Pudestr. (cm)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
665100	9 × 10	5 × 5,5	20	160

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33
3450 Allerød
Tlf. 48 168 168
www.molnlycke.com

Symbolet og ordmærket er begge registrerede varemærker eller patentanmeldte varemærker tilhørende Mölnlycke Health care