



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Foam Adhesive Dressing, er en 4-lags sårforbinding med kraftig absorption og høj fordampningsevne. en behagelig polyurethan skumpude. De 4 lag af non-woven materiale sikrer åndbarheden i forbindingen. Disse lag håndterer overskydende fugt i tilstrækkelig grad ved såvel svage som kraftig væskende sår.

Forbindingen har en transparent barrierefilm. Filmen er semipermeabel, hvilket forebygger lækage og samtidig virker som en barriere mod kontaminering udefra.

Forbindingen bibeholder et fugtigt sårmiljø, som fremmer sårhelingen.

Egenskaber:

- Til moderat og kraftigt væskende sår
- 4-lags sårforbinding med kraftig absorption og høj fordampningsevne
- Væskekонтроllag – fordeler og opretholder væskebalancen
- Barriere mod gennemtrængning
- Hurtig absorption af sekret
- Barriere mod bakterier og virus
- Blødt, absorberende polyuretanskum, som ikke svulmer op

Fordele:

- Nem at anvende og placere pga. af det patenterede edderkopperammesystem
- Lang anvendelsestid – kan sidde på i 7 dage
- Tynd og blød – selv med 4 lag
- Vandtæt barriere tillader patienten at bade
- Nem at fjerne
- Hæfter ikke i sår
- Alt i en forbinding

Indikationer:

- Tryksår
- Venøse bensår, inkl. under kompressionsbandage
- Overfladiske sår
- Neuropatiske, diabetiske sår
- Hudafskrabninger
- Donorsteder ved hudtransplantationer
- 1. og 2. grads forbrændinger
- Arterielle sår

Advarsel:

Brug ikke forbindingen i kombination med oxiderende midler, såsom brintoverilte. Opløsninger af denne type kan påvirke strukturen og dermed effekten af den polyuretane skum.



Brugsvejledning:

- Tag skumforbindingen ud af pakken.
- Hold forbindingen ved hjælp af taperne og fjern den påtrykte liner.
- Pres forsigtigt den klæbende film på huden. Undgå at strække forbindingen eller huden.
- **Hæl:** Mens benet bliver støttet med den ene hånd, placeres forbindingen over såret med den anden hånd.


- **Andet:** Placér forbindingen over såret.
- Tag fat i en sektion af papirlinieren og træk mod kanten, begyndende ved midten af forbindingen.
- Fortsæt indtil alt papiret er fjernet. Glat forbindingen fra midten og ud mod kanten.

Fjernelse:

- Løft forsigtigt forbindingsens kanter fra huden. Påfør en tape på kanterne af forbindingen og brug tapen til at løfte med, hvis der er problemer med at løfte forbindingen.
- Fortsæt med at løfte, indtil alle kanter er løsnet fra huden.
- Fjern forbindingen.

Deklaration:

- Polyuretanskum.
- Skiftetfrekvens: Maks. 7 dage

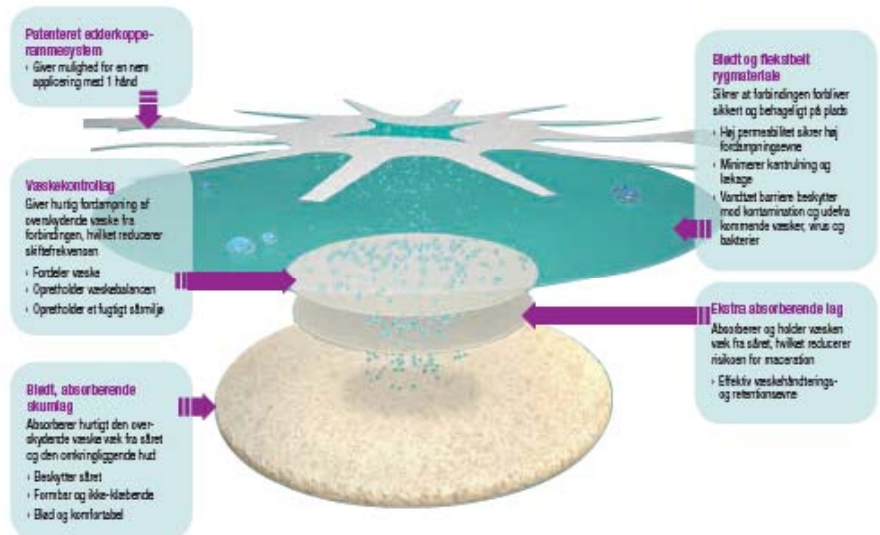

Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Dressing

Varenr.:	Størrelse af skumpude cm x cm	Størrelse af hele forbindingen cm x cm	Antal/æske	Æsker/karton
90610 firkantet	5,0 x 5,0	8,8 x 8,8	10	4
90611 oval	6,0 x 7,6	10,0 x 11,0	10	4
90612 firkantet	10,0 x 10,0	14,3 x 14,3	10	4
90613 oval	10,0 x 11,0	14,3 x 15,6	5	6
90616 oval	14,0 x 17,1	19,0 x 22,2	5	3
90619 rund	7,62 x 7,62	13,97 x 13,97	5	4