

# Mefix<sup>®</sup>

Selvklæbende fiksering for sikker fiksering af bandager, slanger og kanyler

- Sikker, men blid, selvklæbende fiksering<sup>2,3</sup>
- Formbar og behagelig at have på<sup>4</sup>




- Hudvenlig: Ikke-sensibiliserende og ikke-generende<sup>1</sup>
- Åndbar, men vandafvisende

Mefix<sup>®</sup> giver sikker, men blid, fiksering af bandager, slanger og kanyler.


## Sådan anvendes Mefix® – fiksering ved hjælp af S-kurven



1. Klip den ønskede størrelse.

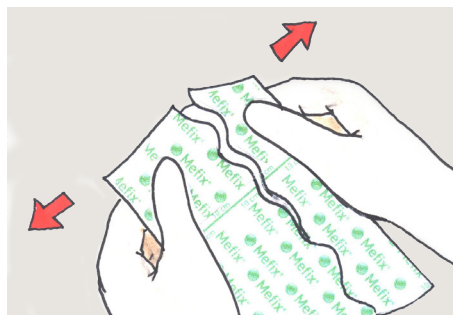

2. Adskil de to dele af beskyttelsespapiret ved at trække/bukke Mefix®. Fjern den smalle del.

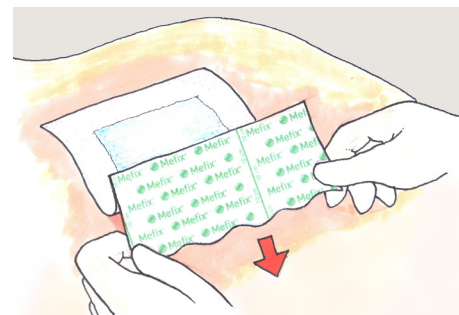

3. Applicér den klæbende side mod huden. Fjern det resterende beskyttelsespapir. Strøg henover bandagen for at opnå optimal klæbefunktion. Stræk ikke Mefix under applicering.

## Sådan virker Mefix

Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer gennemtrængelighed af luft og fugt<sup>1</sup>. Materialet former sig efter kroppens konturer og er behagelig at have på<sup>4</sup>. Det selvkæbende materiale er blevet udviklet til at være skånsomt mod huden, samtidig med at det giver sikker fiksering<sup>2,3</sup>.

## Anvendelsesområde

Mefix kan anvendes i en lang række situationer, hvor der kræves fiksering, herunder fiksering af bandager, slanger og kanyler.

## Fordele ved Mefix

- Hudvenlig
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Åndbar, men vandafvisende

## Forholdsregler

For at forebygge skade på huden bør Mefix ikke strækkes under påsætning. Dette er især vigtigt, når den lægges over led.

## Mefix fås som usteril i 10 og 2,5 meter ruller i dispenserbokse.

Varenr.	Bredde cm	Inderpk./trp.krt.
10 meters ruller		
310250	2,5	40
310500	5	40
311000	10	20
311500	15	15
312000	20	10
313000	30	10
2,5 meters ruller		
310570	5	30
311070	10	30
311570	15	20



Referencer: 1. Molnlycke data on file. 2 Livesley J, Richardson S. Securing methods for peripheral cannulae. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987). 1993;7(31):31-4.

3. Kanapathy M, Mosahebi A. Comparative study on the donor site aesthetic outcome between epidermal graft and split-thickness skin graft. International Wound Journal. 2019;16(2):354-9. 4. Gupta SK, Lee S, Moseley LG. Postoperative wound blistering: is there a link with dressing usage? J Wound Care. 2002;11(7):271-3.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf: + 45 80 886 810, e-mail: [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com). Molnlycke og Mefix varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Molnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0112004

  
**Molnlycke®**