

Flexima® Active, lukket med filter

med en unik elastisk hudklæber

Indikation

- Kolostomi

Egenskaber

- Patenteret elastisk hudklæber med mange fordele:
 - en behagelig bærekraft
 - stor fleksibilitet og god evne til at tilpasse sig hudkonturer
 - efterlader ikke klæberester på huden
 - giver god hudbeskyttelse
 - lille risiko for maseration
 - øjeblikkelig vedhæftning
 - mulighed for repositionering
 - sidder højt oppe på posen og giver dermed bedre komfort og diskretion
- Opklipbar klæber i str.:
 - mini: 15–45 mm
 - midi 15–50 mm
 - maxi 15–65 mm eller 15–80 mm
- Findes også med inspektionsvindue, der gør det muligt at observere stomien. Desuden kan det være en hjælp ifm. påsætning af posen.

Produktbeskrivelse

- 1-dels lukket stomipose med filter
- Blomsterformet elastisk hudklæber, der følger hudens konturer
- 5 forudstansede udgaver
- Findes i transparent og beige
- 3 posestørrelser: mini, midi og maxi




De unikke egenskaber ved Flexima® Active:



- ✓ En sikker, elastisk og smidig hudklæber

- ✓ Inspektionsvinduet giver mulighed for at observere stomien og gøre påsætning nemmere

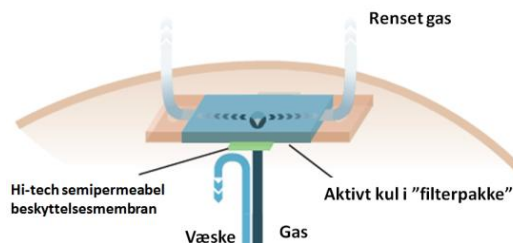

- ✓ Et sikkert filter som renser luften effektivt og minimerer risikoen for ballon-effekt

Påsætning af posen

Anbefaling

Stå op eller sid ned uden at trække i huden eller læne overkroppen bagud under påsætningen (dette strækker huden og kan betyde, at posen ikke sidder ordentligt).

Hjælp evt. påsætningen på vej ved at folde stomiposen. Dette kan give et bedre overblik, når posen skal sættes på.

Det er muligt at løsne klæberen og atter påsætte den, hvis man efter første forsøg ikke er helt tilfreds med resultatet.

Et godt tip til aftagning er at trække klæberen nedad i stedet for at trække udad i klæberen.

Undgå




At svaje ryggen



At trække i huden




At trække i klæberen/posen

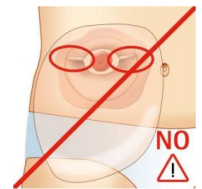

Dette kan medføre risiko for lækage, fordi klæberen laver folder

Følg tegningen

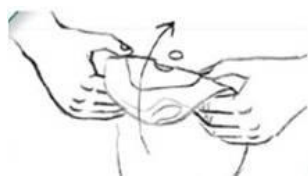

Påsætning



Aftagning

Flexima® Active, lukket med filter

Beige poser Varenr.	Transparenteposer Varenr.	Varenr. med inspektionsvindue (beige)	Størrelse	Stk/ Æske
4610115N	4611115N	4612115N	Midi 15-50 mm ☞	30 stk.
4610125N	4611125N	-	Midi 25 mm	30 stk.
4610130N	4611130N	-	Midi 30 mm	30 stk.
4610135N	4611135N	-	Midi 35 mm	30 stk.
4610140N	4611140N	-	Midi 40 mm	30 stk.
4610145N	4611145N	-	Midi 45 mm	30 stk.
4610380N	4611380N	4612380N	Maxi 15-65 mm ☞	30 stk.
4610480N	-	4612480N	Maxi 15-80 mm ☞	30 stk.
4610215N	-	4612215N	Mini 15-45 mm ☞	30 stk.