


## ÈT OG SAMME PRODUKT - UTALLIGE MULIGHEDER !

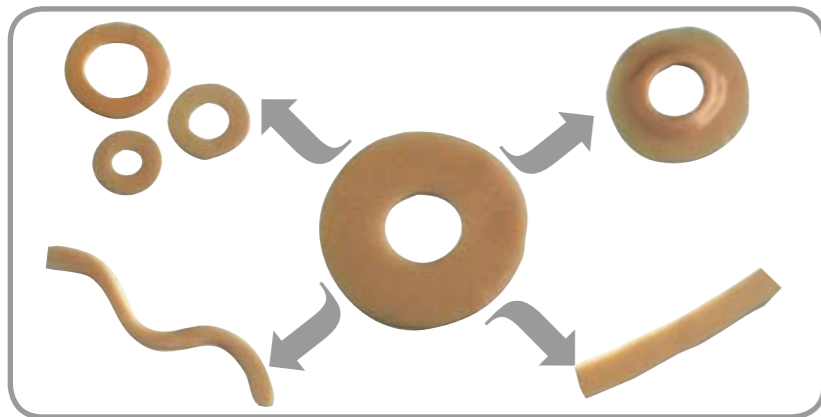

## INGEN LÆKAGE - INGEN SVIE (alkoholfri)



Formning af Eakin Cohesive ringen til nøjagtig din stomistørrelse, rund eller oval form, giver en bedre beskyttelse end en ring med fast hul diameter.

### Tips og råd :

- Eakin Cohesive® ringen kan rulles som en pølse eller placeres lag på lag for at udfylde fordybninger eller folder som eventuelt forårsager lækage.
- Opvarm Eakin Cohesive® ringen mellem hænderne for at øge fleksibiliteten inden den tages i brug.
- Modeller Eakin Cohesive® ringen lige så meget du vil – det mindsker ikke klæbeevnen.
- Eakin Cohesive® ringen kan deles og sættes sammen igen hvis det ønskes.

## FORLÆNGER POSEN/PLADENS BÆRETID

# Cohesive®

For bedste resultat, tilpas ringen tæt omkring stomien som vist her.



	VARE-NUMMER	BESKRIVELSE	DIAMETER	PAKKE STR.
	839001	Store Eakin Cohesive® ringe 98mm udv. Ø 19mm indvendig 2,1 mm tyk.	98mm	10
	839002	Små Eakin Cohesive® ringe 48mm udv. Ø 19mm indvendig 4,2 mm tyk.	48mm	30
	839005	Små Eakin Cohesive SLIMS® ringe 48mm udv. Ø 19mm indvendig 3mm tyk.	48mm	30

eakin®

Ønskes mere information eller gratis prøver kontakt venligst :

Focuscare



Focuscare Denmark ApS.  
Østervangsvej 21  
DK-8900 Randers  
Telefon: +45 49 26 13 99  
Fax: +45 49 21 02 57  
Email: info@focuscare.dk  
www.focuscare.dk

eakin®

Den fleksible løsning  
Alkoholfri



Kun til engangsbrug

Opbevares tørt

Opbevares i æsken ved stuetemperatur

COHFLY3NB (DK)

Produceret af :  
TG Eakin Limited  
15 Ballystockart Road,  
Comber  
Northern Ireland  
BT23 5QY

# Cohesive®



## FOREBYG LÆKAGE

Eakin Cohesive® ringen danner en vandtæt barriere rundt om stomien mellem huden og posen. Er specielt udviklet til at forebygge lækage.

## FOREBYG ØM, IRRITERET HUD

Eakin Cohesive® ringen kan hjælpe med ophejlingen af øm, irriteret hud. Svier ikke og kan forlænge posens bæretid.

Eakin Cohesive® ringen er fuldstændig formbar – én størrelse ring passer alle, uanset om stomien er rund eller oval. Er stomien meget stor i omkreds, kan 2 ringe brydes over og modelleres sammen i forlængelse af hinanden og give en større diameter.

Ingen risiko for stramning af stomien.

Eakin Cohesive® er yderst hudvenlig og alkoholfri.



## SÅDAN BRUGES DEN LILLE EAKIN COHESIVE® RING



1. Huden omkring stomien skal være ren, tør og fri for fedt eller creme.



2. OPVARM Cohesive® ringen mellem hænderne.



3. Form Cohesive® ringen med let hånd til den hulstørrelse der passer. Det er ligegyldigt hvilken side af ringen der er imod huden da ringen klæber ens på begge sider.



4. Placer den på kroppen og form Cohesive® ringen med let hånd så den sidder tæt om stomien. Huden tættest rundt om stomien må ikke være blottet.

5. Den yderste kant af Cohesive® ringen gøres flad. Varmen fra hænderne øger klæbeevnen.



6. Enkel i brug – Placer stomi posen/pladen over Cohesive® ringen og hold den på plads i kort tid. Alternativt kan den opvarmede ring formes og sættes direkte bag på posen/pladen inden den sættes på huden.

## FJERNELSE

Det meste af Cohesive® materialet vil fjernes fra huden samtidig med at posen/pladen skiftes. Er der evt. lidt klæberest tilbage på huden, skader det ikke huden og påvirker ikke den nye rings evne til at klæbe. Vask området med lunkent vand og tør. Derefter kan den nye ring sættes på.

## SÅDAN BRUGES EN STOR EAKIN COHESIVE® RING



### Forberedelse til brug af stor Eakin ring:

1. Fjern kun en side af papiret.

2. Begynd ved midten af hullet, rul forsigtigt Eakin Cohesive® ringen ud, indtil hullet er lidt større end stomiens diameter.



3. Huden omkring stomien skal være ren og tør, fri for creme, hudfilm eller pudder.

4. Placer ringen omkring stomien og rul ringen tilbage igen imod stomien, indtil den passer og sidder som en slags "rullekrave", eller gør den flad, hvis det ønskes.

### Kan også sættes på således ved 2-dels system.:

I nogle tilfælde kan Eakin Cohesive® ringen sættes direkte på pladen før den placeres omkring stomien, som vist fornedet.

Hvis denne metode bruges, skal det gøres lige inden den sættes på stomien.

