


HVORDAN DEN VIRKER

Cohesive® PASTA er baseret på den samme formel som andre **Cohesive®** produkter og beskytter huden omkring stomien på nøjagtig samme måde:

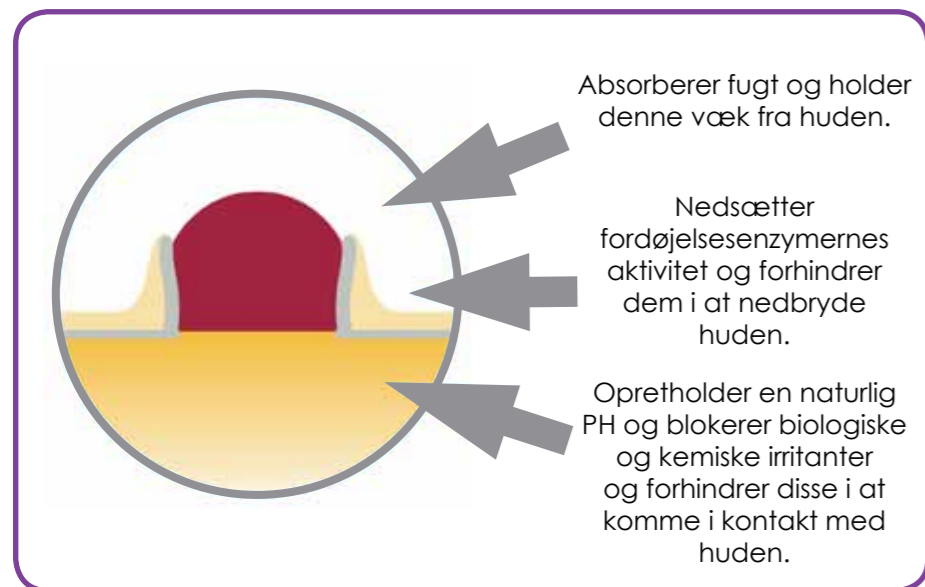

“(Med **Cohesive® PASTA**) Jeg har ikke brug for at skifte pose så ofte og det betyder at min hud er mindre rød og irriteret.”



eakin® 

Velvære og Sikkerhed



eakin® 

Kontakt os venligst for mere information og prøver :

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk



ECFPLY/2NB (DK)
Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

Cohesive® PASTE

VELVÆRE



Cohesive® PASTA er en stomi pasta der er anderledes. Det er en unik, alkohol-fri pasta som giver en højere grad af velvære og sikkerhed.

Cohesive® PASTA er i familie med produkterne Eakin **Cohesive®** ringe og **Cohesive SLIMS®** og er baseret på samme formel. Produkter der har beskyttet huden omkring stomier i mere end 30 år.

“ Jeg er vild med **Cohesive® PASTA**, den har givet mig stort velvære og er nem at bruge. ”

ALKOHOL- FRI

- Ingen af Eakin® produkterne indeholder alkohol og er derfor overordentligt hudvenlige. **Cohesive® PASTA** er behagelig, fordi den ikke svier på huden, som almindelige stomipastaer gør.
- Ingen alkohol betyder også at **Cohesive® PASTA** ikke tørrer ud. Derfor er der intet spild, hvis du skulle glemme at sætte hæften på tuben.



“ Jeg føler ingen smerte når (Cohesive®) pastaen kommer på hudløs hud, faktisk dulmer det. ”

“ Jeg har brugt pasta i mange år og har vænnet mig til at det gjorde ondt, men med denne (Cohesive®) pasta mærker jeg ingenting. ”

HUDVENLIG

Når brugere bliver bedt om at beskrive deres huds tilstand efter brug af **Cohesive® PASTA** er svarene meget positive :

- ‘Sårene omkring min stomi er nu helet op.’
- ‘Min hud holder sig sundere når jeg bruger pastaen’
- ‘**Cohesive® PASTA** følte behagelig at bruge’
- ‘Min hud er bedre nu, den er mindre rød’
- ‘Min hud er helet og kløen er holdt op siden jeg startede med at bruge pastaen’.

NEM AT BRUGE

- **Cohesive® PASTA** er hurtig og nem at bruge. Den vil fæstne på fugtig hud og man behøver ikke vente på at pastaen skal tørre før man sætter posen på.
- **Cohesive® PASTA** kan bruges omkring en colostomi, ileostomi og urostomi og til at udfylde dybe hudfolder, ar eller ujævne overflader med. Kan anvendes sammen med alle typer af poser.
- **Cohesive® PASTA** danner en gel og bliver ikke hård som almindelige stomipastaer. Derfor er den meget behagelig og nem at fjerne.
- **Cohesive® PASTA** skal IKKE bruges sammen med pudder eller creme. Kan anvendes sammen med **Cohesive SLIMS®** eller **Cohesive®** ringen.

Brug af Cohesive® PASTE i stedet for andre pastaer:



1 Rengør og tør huden omkring stomien, huden skal være helt fri for opløsningsmidler, pudder eller fedtstof.



2 Tryk pastaen ud og udfyld alle hudfolder, ar eller ujævne overflader.



3 Kom derefter pasta rundt om hele stomien – helt tæt op til slimhinden.



4 Sæt posen på plads og hold den fast der ca. 30 sekunder.

Brug af Cohesive® PASTE sammen med SLIMS®:



1 Rengør og tør huden omkring stomien, huden skal være fri for opløsningsmidler, pudder eller fedtstof.



2 Udfyld alle hudfolder, ar og ujævne overflader hvis effekten af **Cohesive SLIMS®** skal optimeres.



3 Placer derefter **Cohesive SLIMS®** helt tæt op til stomi slimhinden.



4 Sæt posen på plads og hold den fast der i ca. 30 sekunder.

Cohesive® PASTE