

VARENUMRE

	Paknings størrelse	Varenummer
Eakin Perform™	60 gelposer	839020

ANDRE TILBEHØRSPRODUKTER FRA EAKIN® :

	Alkoholfri	Paknings størrelse	Varenummer
	Release™ klæbefjerner som spray	1 x 50 ml e	839023
	Release™ klæbefjerner som vådserviet	30 servietter	839024
	Protect™ hudbeskyttelsesfilm som vådserviet	30 servietter	839025

eakin® 

Reducerer lugtgener,
Forebygger lækage !



eakin® 

Kontakt os venligst for mere information og prøver :

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Focuscare



Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

Perform™
GELDANNENDE MIDDEL

FULD SIKKERHED

Perform™ sikrer fuld kontrol med stomiposen, idet den omdanner tyndt stomioutput til en gel, som forebygger lækage af posen og giver brugeren øget kontrol og tryghed.

LUGTGENER KAN KONTROLLERES



Perform™ har bevist at kunne reducere uønskede lugte, og dette giver dig øget tryghed i hverdagen.

Perform™ RAMMER RIGTIGT I ALLE BOXE

FORDELE	Perform™
Mindsker lugtgener	✓
Gør det nemmere at tømme posen (Bemærk at Perform™ IKKE pletter)	✓
Reducerer ballondannelse af posen	✓
Fremmer filterets funktion	✓
Formindsker lyde	✓
Øger sikkerheden især om natten	✓
Perform™ er farveløs, pletter ikke og giver mulighed for at observere posens indhold	✓
Der behøves kun 1 gelpose og den opløses hurtigt	✓

NEM AT BRUGE

Perform™ kan bruges på 2 enkle måder:



Placer en **Perform™** gelpose ned i stomiposen, gennem åbningen.


ELLER



Eller ved brug af en tømbar pose kan man tilføje en ny gelpose via udløbet efter hver tømning.

Advarsel : Åben ikke gelposen. Må ikke spises.

*Prøv **Perform™** og find ud af hvilken forskel det kan gøre for dig.*

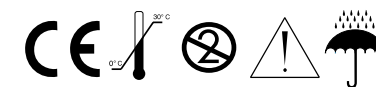

Perform™
GELDANNENDE MIDDEL