

carefix[®]
Creating functional comfort



LeggyFix
Urinposefiksering



TYTEX[®]

LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den er designet, så den holder posen sikkert på plads og samtidig fordeles trykket fra posen ligeligt rundt om benet.

Egenskaber:

- Nem at anvende
- Holder posen sikkert på plads og sikrer derved optimal støtte
- Fordeler trykket fra posen ligeligt rundt om benet
- Diskret fremtoning
- Reducerer støj fra posen
- Afhjælper risikoen for tryksår
- Ekstra sikkerhed ved fysisk aktivitet
- Meget elastisk, blødt og åndbart materiale
- Passer til både højre og venstre ben
- Passer til både lår og læg
- Med slids i bunden til urinposer med bundaftapning
- Kan holde op til 750 ml
- Praktisk farvekode angiver størrelsen
- Tåler vask ved 60°C
- Latex-fri
- Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100

Anvendelse:

LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den skal ombukkes, så den danner en lomme til urinposen. Når LeggyFix er ombukket, ses slidsen i bunden, der passer til ventilen i urinposer med bundaftapning.

Kvalitet:

63% polyester, 37% elasthan.

Vaskeinstruktioner:



60°C

Anbefalede størrelser:

STØRRELSESSKEMA	XS	S	M	L	XL
BENETS OMKREDS	25 - 33 cm	33 - 40 cm	40 - 50 cm	50 - 60 cm	60 - 70 cm

Farvekode på produktet angiver størrelsen.

Pakning:




10 stk. per pose


Instruction for use:




1 Træk fikseringen på benet med syning udad og farvekode opad.

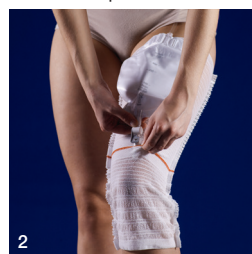

2 Træk urinposens ventil gennem hullet i den røde linje.

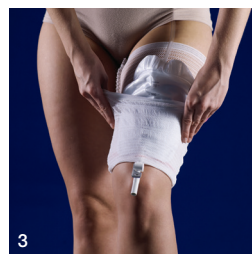

3 Træk den nedre ende af fikseringen op over urinposen.

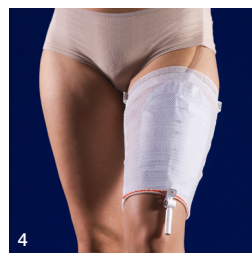

4 LeggyFix er på plads.

For yderligere information:

Forhandler:

DS-LeggyFix-02-DA-0316