

Actreen Lite®

Engangskateter med glycering coating



Indikation

- Intermitterende kateterisation

Egenskaber

- Let at benytte – velegnet ved nedsat motorik
- Beskyttelsesfolie giver godt greb under indføringen
- 'No-touch system'
Beskyttelsesfolien omkring kateteret sikrer, at der ikke er direkte kontakt mellem fingre og kateter
- Kateteret kan tåle at være bukket op til 24 timer
- Vejer ingenting
- Kan tilsluttes urinopsamlingspose


Produktbeskrivelse

- Klar til brug, sterilt kateter
- Coatet kateter med vandholdig glycerin
- 2 forskellige åbningsmuligheder af kateter spidsen
- Mulighed for at åbne kateteret med fx en tommelfinger
- Brugervenlige æsker – kan åbnes på 2 måder



Åbning for urinudløb – brugsvejledning

Åbning af emballagen ved kateterets udløb sker bedst ved at rive på tværs af indpakningen mellem punkt '1 og 2'. Dette er lettere end at trække i længderetningen

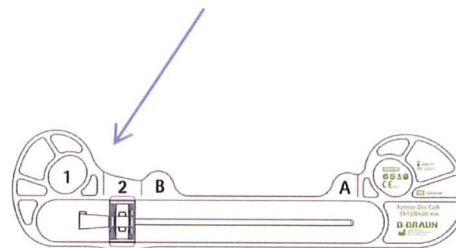

2 muligheder for frigørelse af kateterspidsen – brugsvejledning

Perforering A

Beskyttelsesfolien trækkes en 10 cm tilbage uden at kateteret berøres og kateterisationen påbegyndes. Det er muligt at holde på beskyttelsesfolien, hvilket giver et godt greb om kateteret og kan være medvirkende til at undgå blærebetændelse

Perforering B

Der holdes om udløbet/konnektoret, kateteret berører ikke, men føres blidt ind

Actreen Lite, Nelaton spids, 20 cm, 30 stk./æske						
CH	06	08	10	12	14	16
Varenr	228306	228308	228310	228312	228314	228316
Actreen Lite Mini, Kvinde/barn, 9 cm, 30 stk./æske – se specialbrochure						
CH			10	12	14	
Varenr			228010	228012	228014	