



Actreen Lite®

Engangskateter med glycering coating

Indikation


- Intermitterende kateterisation

Egenskaber

- Let at benytte – velegnet ved nedsat motorik
- Beskyttelsesfolie giver godt greb under indføringen
- 'No-touch system' Beskyttelsesfolien omkring kateteret sikrer, at der ikke er direkte kontakt mellem fingre og kateter
- Kateteret kan tåle at være bukket op til 24 timer
- Vejer ingenting
- Kan tilsluttes urinopsamlingspose


Produktbeskrivelse

- Klar til brug, sterilt kateter
- Coated kateter med vandholdig glycerin
- 3 forskellige åbningsmuligheder af kateterspidsen
- Mulighed for at åbne kateteret med fx en tommelfinger
- Brugervenlige æsker – kan åbnes på 2 måder

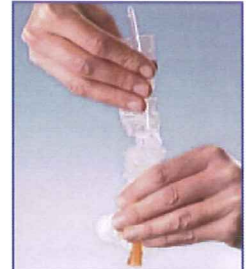

Åbning for urinudløb – brugsvejledning

Åbning af emballagen ved kateterets udløb sker bedst ved at rive på tværs af indpakningen mellem punkt '1 og 2'. Dette er lettere end at trække i længderetningen

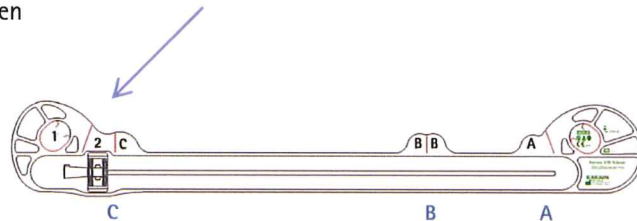

3 muligheder for frigørelse af kateterspidsen – brugsvejledning

Perforering A

Beskyttelsesfolien trækkes et stykke tilbage uden at kateteret berøres og kateterisationen påbegyndes. Lige før folien berører glans penis, klemmes blidt om urinrøret og dermed det indførte kateter. Med den frie hånd, trækkes folien yderligere tilbage og kateterisationen fuldendes

Perforering B

Kateterisationen kan påbegyndes med det samme. Lige før folien berører glans penis, klemmes blidt om urinrøret og dermed det indførte kateter. Med den frie hånd, trækkes folien yderligere tilbage og kateterisationen fuldendes

Perforering C

Der holdes om udløbet/konnektoret, kateteret berører ikke, men føres blidt ind

Actreen Lite, Nelaton spids, 45 cm, 30 stk./æske						
CH	08	10	12	14	16	18
Varenr	228208	228210	228212	228214	228216	228218
Actreen Lite, Tiemann spids, 45 cm, 30 stk./æske						
CH	08	10	12	14	16	18
Varenr	228108	228110	228112	228114	228116	228118