



Brugervenligt håndtag (sterilt i pakken) for godt greb og non-touch-teknik. Kan monteres på standardurinopsamlingspose eller forlængerslange.

Omgående aktivering - steril saltvandsopløsning medfølger, et let tryk og katetret er klart til brug.

Diskret design.

Pakningen fungerer også som hygiejnisk og diskret affaldspose efter brug.

Glatte huller for maksimal komfort.

Indeholder ikke PVC, ftalater eller latex.



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret er skånsomt, sikkert og lige så glat ved udtagning som ved indføring.



Brugervenlig æske.

Anvendelse

LoFric® Sense™ engangskateter anvendes til intermitterende kateterisering.

Sterilisering og holdbarhed

Alle katetre er strålesteriliserede. Oplysning om seneste anbefalede anvendelsesdag er påtrykt pakningen.

Pakning

Æske: 30 stk. katetre.
Transportkarton: 4 x 30 stk.
= 120 stk.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Vandpose: Lamineret folie af polyethylen terephthalate (PET), aluminium og polyethylene (PE). Steril saltvandsopløsning (NaCl).

Enkelt pakning: Laminatfolie af polyester med aluminiumoxid (PET/Alox), lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE), aluminiumsfolie.

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Str.
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton	15 cm	CH 14

LoFric® Sense™


Brugsanvisning

Vigtig information


Sørg for at brugeren har fået tilstrækkelig oplæring i at udføre kateterisering.

Begynd med at vaske hænderne med vand og sæbe.


Dette er et sterilt engangsprodukt. Efter brug vil belægningen nedbrydes, og det er ikke længere sterilt. Anvend kun saltvandsopløsningen til klargøring af katetret.

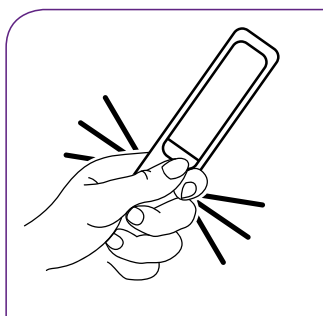


1. Fold den nederste del af emballagen, og tryk til. Katetret er klart til brug.

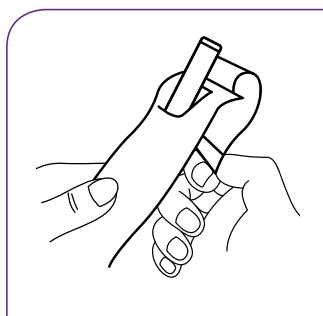

2a. Åbn fligen, vikl den bagover. På bagsiden er en selvklæbende flig til ophængning af katetret.

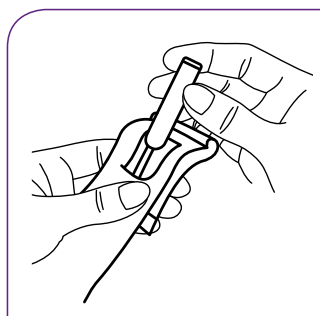

2b. Tag katetret ud af emballagen.

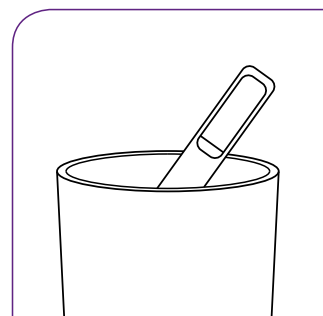

3. Pakningen fungerer også som hygiejnisk og diskret affaldspose efter brug.