

Uro-Tainer® Twin

Til forebyggelse og bekæmpelse af inkrustationer i/på permanente katetre

Indikation

- Tilstopning af permanente top- og blærekatetre pga. bakterielle inkrustationer/forkalkninger i og på katetret

Egenskaber

- Virker profylaktisk mod tilstopning af katetret
- Forlænger katetrets levetid
- Færre kateterskift og mindre risiko for kontaminering
- Minimerer traumer og smerter ved fjernelse af katetret
- Er steril og klar til brug

Produktbeskrivelse

- PVC-frit lukket, sterilt og sikkert system
- Suby G (citronsyre 3,23 %) anbefales som profylaktisk hjælpemiddel, hvis patienten er defineret som 'blokker'*
- Solutio R (citronsyre 6 %) anbefales, hvor der trods brug af Suby G forsat er stop af katetret
- Solutio R kan benyttes i forbindelse med kateterskift
- De to opløsninger kan kombineres

Inkrustationer

- Skyldes at bakterier i urinen oftest proteus (nogle mere aktivt end andre) producerer enzymet urease. Dette øger urinens pH-værdi, hvilket medfører en udfældning af magnesium og calcium salte. Det betyder kalkbelægninger/ inkrustationer i og på kateteret og dermed stop af dette.

* 'Blokker' = to eller flere tilstoppede katetre over 6 uger

Uro-Tainer® er en nødvendig forudsætning for at sikre en optimal funktion af katetret



OBS!

- Instillation med Solutio R kan i få tilfælde give en let sven. Der kan evt. efterskylles med NaCl.
- Hold pause med Uro-Tainer®, hvis og mens der behandles for en blærebetændelse.

Skyleregime

Ved kateterstop hver/hver anden uge

Uro-Tainer® Twin Suby G: 2 gange ugentligt i 2 uger

Hvis kateterurinen herefter løber, som den skal, kan skyllefrequensen eventuelt sættes ned.

Hvis der fortsat er kateterstop pga. inkrustationer, sættes skyllefrequensen op. Alternativt skylles med Uro-Tainer® Twin Solution R i stedet for.

Følg altid de lokale instrukser. Kontakt evt. kontinenssygeplejersken.

Brugsvejledning

Se bagsiden af dette datablad eller gå ind på B. Brauns danske hjemmeside for at se to videoer, der gennemgår den praktiske håndtering samt den teoretiske viden om Uro-Tainer® Twin.

www.bbraun.dk urologi/inkontinens, skyllevæsker og så Uro-Tainer®Twin

Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske	Salgsenhed pr. karton
9746609	Uro-Tainer® Twin Suby G 2 x 30 ml, 3,23 % citronsyre	10 stk.	60 stk.
9746625	Uro-Tainer® Twin Solutio R 2 x 30 ml, 6 % citronsyre	10 stk.	60 stk.

Uro-Tainer® Twin

Middel til vedligeholdelse af permanente urinkatetre – dobbelt skylning



1. Emballagen åbnes, og Uro-Tainer® Twin tages ud.



2. De to klemmer (grøn og hvid) til Uro-Tainer® Twin kamrene lukkes



3. Fjern forseglingen fra hættten.



4. Drej og træk hættten af uden at berøre den sterile konnektor. Åbn for den hvide klemme* og tillad få dråber af væsken at løbe op i slangen for at fjerne evt. luftbobler i denne. Luk klemmen igen.

** Da indholdet i de to kamre er identisk, og væsken fra begge kamre skal anvendes til skylning af katetret, er det uden betydning, om den hvide eller grønne klemme anvendes først, så længe instruktionen følges.*



5. Indfør konnektoren i katetret. Dermed kobles Uro-Tainer® Twin posen til katetret.



6. Hold Uro-Tainer® Twin over blæreniveau, åbn den hvide klemme og lad væsken fra det første kammer løbe ind gennem katetret. For at undgå gener i blæren tving eller pres *ikke* væsken ind. Lad i stedet væsken løbe ind med tyngdekraftens hjælp. Efter indløb luk for den hvide klemme for at blokere for tilbageløb.



7. Efter 5 minutters virketid åbnes den hvide klemme, posen holdes under blæreniveau, og den brugte opløsning løber ud. Luk for slangen med den hvide klemme. Afbryd ikke forbindelsen mellem posen og kateteret.



8. Gentag processen ved denne gang at benytte det andet kammer (grøn klemme).



9. Sørg for at begge klemmer er lukkede. Fjern konnektoren fra katetret ved at dreje den forsigtigt rundt. Urinposen tilsluttes, og Uro-Tainer® Twin posen kasseres efter brug. Posen må gerne tømmes i toiletet. Kun til engangsbrug.