

### Operationsmaske

REF 2854 (Vnr. 702012)

Page 1 (2)

Version: 10.01.2014, rev 3

Printed: 27.2.2017

REF/Vnr.	Farve/str.	Fiksering	
2854/ 702012	Blå, bredde: 17,8 cm	<b>Bindebånd</b>	
<p><b>Klassificeret som type IIR i henhold til EN14683:2014 Europæiske standard for Operationsmasker</b></p> <p>Bakteriel Filtrerings Effektivitet (BFE) &gt;98%</p> <p><b>[ NATURAL LATEX FREE ]</b></p> <p><b>Påtagning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form næseklemmen. Placer masken så den dækker næse og mund</li> <li>2. Placer det øverste bindebånd på toppen af hovedet og bind stramt.</li> <li>3. Træk det nederste bindebånd rundt om nakken og bind stramt.</li> <li>4. Fold masken <u>helt</u> ud og ned over hagen.</li> </ol>			
<p><b>Rå materialer:</b>  <b>1<sup>st</sup> ydre dækmateriale</b>  <b>2<sup>nd</sup> ydre dækmateriale</b>  <b>Filter</b>  <b>Indre dækmateriale</b>  <b>Næse wire/tråd</b>  <b>Anti refleks</b>  <b>Visir</b>  <b>Bindebånd</b>  <b>Anti-dug, inderste</b></p>			<p>spunbond polypropylen, blå                      spunbond polypropylen, hvid                      meltblown polypropylen , hvid                      hydrofilt væv, hvid                      pe-coated galvaniseret wire/tråd                      viskose + PET laminat, sort                      anti-dug film                      spunbond polypropylen, hvid                      laminat lys blå PU skum/lys blå spunbond polypropylene</p>
<p><b>REACH regulativer:</b></p>			<p>Produktet som omfattes af dette datablad indeholder ikke cancerfremkaldende, mutagene eller giftige substanser. Det inkluderer heller ikke nogen af de emner, der er nævnt i (SVHC) (Substances of Very High Concern) som er listet i den seneste version af kandidatlisten publiceret af ECHA (European Chemicals Agency).</p>
<p><b>Egenskaber:</b></p>			<p>A type IIR operationsmaske med visir. Stænkresistent, anti-dug og anti-refleks. Blødt lag inderst for større komfort. Anbefales til våde indgrab, med risiko for stænk.</p>

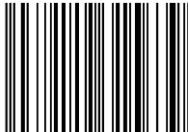

Operationsmaske  
REF 2854 (Vnr. 702012)

Page 2 (2)

Version: 10.01.2014, rev 3

Printed: 27.2.2017

<b>Forpakning:</b>	25 stk/dispenser, 4 dispensere á 25 stk (= 100 stk)/karton
<b>Dispenser:</b>	Pap 190 x 222 x 95 mm
<b>Transportkarton:</b>	Pap 204 x 232 x 392 mm
<b>Salgsenhed:</b>	Transportkarton (4 dispensere á 25 stk)
<b>Compliance med legale krav:</b>	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klasse I
<b>Compliance med produkt standarder:</b>	EN 14683:2014, Type II R
<b>Kvalitetsstandarder:</b>	Produktet er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001, ISO 13485
<b>Mærkning:</b>	I overensstemmelse med EN ISO 15223-1 and EN1041
<b>Anbefalet opbevaring:</b>	Opbevares rent og tørt ved stuetemperatur. Bør ikke udsættes for direkte sollys eller andre intensive lyskilder eller ozon.
<b>Affaldshåndtering</b>	Følg lokale retningslinjer
<b>Risiko hvis genanvendt:</b>	Produktet er beregnet til engangsbrug. Hvis genanvendt kan produktets performance falde og krydskontaminering kan opstå.

Produkt	Dispenser	Transportkarton
REF 2854	6438129315639 2854 dispenser  6 438129 315639	6438129515633 2854 carton  6 438129 515633