

Lagenunderlage Eldner
Hjælpemidler i hjemmet • Siddende, liggende og komfort • Lagenunderlage

Vare nr: 1169-S,
1169-M, 1169-L

Lagenunderlaget Eldner er et lagenunderlag til personer, der lækker urin.

Lagenunderlaget lægges på sengen, og absorberer urin og beskytter sengemadrassen mod urinlækage. Lagenunderlaget har en vandtæt barrierelag forneden, og en kerne med et meget absorberende materiale. Lagenunderlaget er lamineret, hvilket gør det meget robust og får lagenet til at ligge stramt på sengen, uden risiko for indre folder. Sørg altid for, at vingerne er foldet ind under sengen for den største komfort og sikkerhed.



Varemærke	Absorba			Brugsanvisning og råd under brug • Vask lagenunderlaget inden brug for at aktivere absorptionsevnen. • Læg lagenunderlaget på sengen med Sanicare-logoet mod madrassen. • Sørg for, at lagenunderlaget er sikkert på plads med vingerne. Træk ikke i vingerne, mens lagenunderlaget anvendes. • Kontroller, at lagenunderlaget passer til bredden på sengen.
Navn	Absorba Lagenunderlage Eldner			
Art nr	1169-S	1169-M	1169-L	
Samlet overflade	B 190 x L85 cm	B215 x L85 cm	B250 x L85 cm	
Absorberende overflade	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm	B150 x L85 cm	
Sengebredde	80-105 cm	110-120 cm	140-160 cm	
Absorptionskapacitet i henhold til SS 8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)			
Antal produkter/förpackning	1 stk			
Material	50% Bomuld, 50% Polyester 95% Polyester, 5% Rayon Polyuretan 50% Polyester, 50% Bomuld 100% Polyester			
Liggeoverflade				
Absorptionslag				
Barrierelag				
Vinger				
Underside				
Antal vaske (husholdningsvask, ikke industrivask)	Ca 450 stk			
Bortskaffelse	Tekstilgenbrug eller brændbart affald, sorteres efter lokale instruktioner			
Opbevaring	Stuetemperatur			
Andre oplysninger	Produktet indeholder ikke PVC eller Latex. Produkttræning/information kan fås på forespørgsel under indkøbet.			

Bemærk, at lagenunderlaget ikke må bruges til at flytte eller løfte brugerne med!

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Vaskeanvisning



Produktet overholder (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EC for medicinsk udstyr.



Vare nr 1169-S, 1169-M, 1169-L



Kontroller, at sømme og materialet er intakte og uden skader. Hvis der er tegn på slitage, skal produktet bortskaffes. Bemærk, at lagenunderlaget ikke må bruges til at flytte/placere brugerne med! Der er en risiko for, at brugeren kan falde ud af sengen, hvis sådan en forflytning alligevel foretages! Fold altid vingerne ind under sengen. Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte folk med.

Må ikke placeres i nærheden af eller i direkte kontakt med genstande eller anordninger, der udsender høj varme.

I tilfælde af alvorlige produktdefekter/hændelser, kontaktes producenten.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr er på produktet



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

