




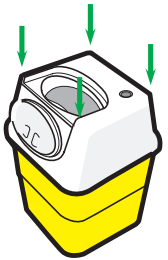





| PRODUKTSPECIFIKATIONER | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Produktnavn | | Sharpsafe kanyleboks 3,0 liter | | |
| Producent | | Frontier Medical Group, South Wales, UK | | |
| Varenummer | | DK4145 | | |
| Anvendelse og montering | | Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald Boksen er stabelbar og leveres usamlet – vend arket for vejledning | | |
| Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold) | | 2,06 liter | | |
| Dimensioner (h x b x d) | | 203 x 197 x 126 mm | | |
| Aftagstyper | | Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel, sommerfugl, blodtagningssystem | | |
| Vægt (uden indhold) | | 70 gr | | |
| Pakning | | Karton: 50 stk. / Europalle: 11 x karton | | |
| Materiale | | Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding) | | |
| Godkendelser | |  |  | Produktet bærer to godkendelser: 1. Kitemark® (British Standard) 2. UN (United Nations) |
| Advarsler | | |  | Produktet bærer en advarsel: 1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko HUSK! Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse |
| Bortskaffelse | | Bortskaffelse sker ved forbrænding Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m. | | |
| Beslag, stands og ophæng (Varenummer og beskrivelse) | | DK4290 | Krog | |
| | | DK4242 | Bøjle | |
| | | | | |


Vend arket og se vejledning →



SÅDAN SAMLER OG ANVENDER DU SHARPSAFE KANYLEBOKSEN
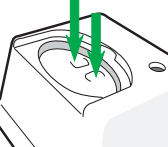
| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: right;">1</p> | <p>Montering Sæt låget på beholderen Tryk på hvert hjørne af låget Et hørbart klik bekræfter, at låget er monteret korrekt på beholderen</p> |
|  <p style="text-align: right;">2</p> | <p>Midlertidig lukning Låget kan lukkes midlertidigt og åbnes igen ved at presse det let ned</p> |
|  <p style="text-align: right;">3</p> | <p>Åbning af midlertidig lukning For at åbne midlertidig lukning, ryk op i den lille flap</p> |
|  <p style="text-align: right;">4</p> | <p>Permanent lukning Når boksen er fuld, pres fast ned på låget og kanyleboksen er lukket permanent</p> |

DK 200722

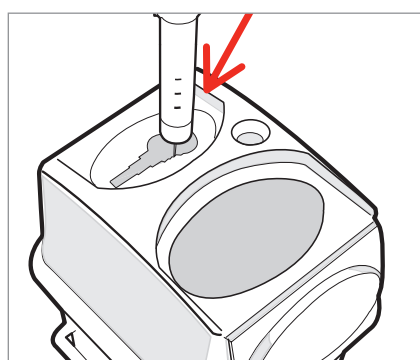

AFTAG PÅ SHARPSAFE 3,0 LITER

- Luer lock
- Luer slip
- Novo-pen
- Skalpel
- Sommerfugl
- Blodtagningssystem

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com