

Sorbact® Absorption

Bakterie- og svampebindende sårbandage

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektioner
- ✓ Fjerner bakterier, svampe og endotoksiner på en sikker måde
- ✓ Effektiv mod de mest almindelige resistente patogener¹
- ✓ Nem at anvende



Reducerer den mikrobielle belastning i moderat til kraftigt væskende sår

Sorbact® Absorption er en bakterie- og svampebindende sårbandage, baseret på Sorbact® Technology. Den består af et Sorbact® DACCTM-coated sårkontaktlag kombineret med en absorberende kerne. Produktet absorberer og tilbageholder ekssudat. Sorbact® Absorption forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen.

Binder • Hæmmer • Fjerner

En unik, klinisk dokumenteret teknologi til behandling af sårinfektioner. Baseret på en fysisk virkemåde fjerner forbindinger med Sorbact® Technology sikkert bakterier, svampe og endotoksiner for at forebygge og behandle sårinfektioner uden at frigive aktive stoffer i såret.

Anvendelse

Sorbact® Absorption er velegnet til behandling af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede moderat til kraftigt væskende sår, som f.eks. kirurgiske sår, traumesår, tryksår, diabetiske fod- og bensår. Sorbact® Absorption er velegnet til overfladiske sår.

Brugsanvisning

1. Forbered såret og den omkringliggende hud i henhold til lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Bandagen skal overlape sårkanterne med mindst 2 cm. Der må ikke klippes i bandagen.
3. Fjern bandagen fra emballagen med steril teknik.
4. Læg bandagen på. Sørg for, at det grønne kontaktag kommer i direkte kontakt med hele såret, for at mikroorganismer kan binde sig til bandagen.

5. Fiksér med en elastisk bandage eller hudvenlig tape.
6. Bandagens skiftfrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau og den omgivende huds generelle tilstand. Hvis den kliniske tilstand tillader det, kan bandagen ligge på i op til 7 dage.
7. Hvis bandagen klæber til såret, skal den fugtes for at lettere gøre fjernelse, og for at undgå at afbryde sårhelingen.

Sorbact® Absorption kan anvendes sammen med kompressionsterapi.

Sorbact® Absorption er MR-sikker. Fjern Sorbact® Absorption før strålebehandling. En ny bandage kan lægges på efter behandlingen.



For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forholdsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU) læses inden brug.

Sorbact® Absorption

Varenr.	Størrelse	Stk./pakke
98226-10	7 x 9 cm	10
98225	10 x 10 cm	10
98223	10 x 20 cm	10



1. Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. *EWMA* 2020. EP006.

Læs mere på sorbact.dk

Sorbact® Technology er en unik innovation, som anvendes i vores avancerede sårbehandlingsprodukter, for at forebygge og behandle sårinfektioner. Produkter med Sorbact® teknologien hjælper patienter i mere end 65 lande gennem vores brands Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® og Cutimed® Sorbion® Sorbact®.