

# Verisafe Plus penkanyle 31G (0,25 x 5 mm)

## Beskrivelse:

Verisafe Plus penkanyle skal anvendes sammen med en insulinpen. Dette er en penkanyle der er udviklet til at mindske smerter. Inden insulinen injiceres, skal du kontrollere, at der er fri passage igennem nålen. Dette gøres ved at indstille dosisvælger på en eller to enheder og sprøjte insulinen ud i luften. Derefter indstilles dosisvælger til den ønskede mængde insulin. Forpakningsstørrelse: 100 stk. Kanylélængde: Se specifikationer nedenfor. Diameter: Se specifikationer nedenfor. Kanylen skrues på pennen. Kanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det at kanylen skiftes efter hver injektion. Passer til de fleste insulinpenne på markedet. Kanylen er steril og silikonebelagt. CE mærket: ja. Vigtigt: Skal du bruge kanyler for første gang bør størrelsen samt injektionsteknik udelukkende vælges ud fra en anbefaling fra enten din læge eller diabetessygeplejerske. Ønsker du at skifte størrelse på nålen bør du konsultere din læge eller diabetessygeplejerske.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8090899

100 stk.

NPN-31-5

## Specifikationer

### Sikkerhedskanyle:

Nej

### Gauge:

31

### Længde:

5

### Diameter:

0,25

### CE labeled product:

Ja

### MD Classification:

MDD Class IIa

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED