



ViTri:sårfilm med pude

Produktbeskrivelse:

ViTri:sårfilm med pude er en transparent, semipermeabel bandage, der kan tåle overbrusning, og som består af en tynd PU-film med latexfrit klæbemiddel og en ikke-klæbende sårpude belagt med perforeret PE-film. Bandagen er gennemtrængelig for damp og ilt. En intakt bandage beskytter det dækkede hudområde mod udefra kommende kontaminering. Let absorptionskapacitet. Sterilt emballeret.

Indikationer:

Anvendes som bandage postoperativt, ved sårskader og forbindelse af sår, hvor der er brug for en bandage, der tåler overbrusning.

Kontraindikationer:

Lad være med at bruge bandagen, hvis patienten er allergisk over for et eller flere af bandagens komponenter.

Påsætning:

Rens såret og den omgivende hud. Vent med at sætte bandagen på, indtil desinfektionsmidlet eller hudbeskyttelsesmidlet er blevet tørt. Inden påsætning bukkes bandagen ved pilemarkeringerne, hvor det andet beskyttelsespapir skal fjernes, så det bliver nemmere at fjerne papiret efter påsætning. Rør ikke ved klæbet. Træk beskyttelsespapiret af, så den klæbende overflade frigøres delvis. Hold fast i beskyttelsespapiret mod den klæbende overflade og begynd påsætning hen over området, der skal dækkes. Anbring bandagen i midten af den overflade, der skal dækkes. Træk beskyttelsespapirerne i hver sin retning, indtil de er helt fjernet. Gnid bandagen fast fra midten og ud mod kanterne for at sikre, at bandagen slutter tæt i kanterne. Gnid ekstra rundt om kanterne for at sikre, at de klæber ordentligt, inden det andet beskyttelsespapir fjernes.

Pleje efter påsætning:

Bandagen skiftes efter normal praksis på stedet, hvis bandagens beskyttende egenskaber er påvirket, fx hvis bandagen er punkteret eller har sluppet et sted i kanterne.

| Varenummer | Beskrivelse |
|------------|---|
| 802011 | 5 x 7 cm med sårpude, 100 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802013 | 6 x 10 cm med sårpude, 50 stk./pk., 1.200 stk./stor pk. |
| 802014 | 9 x 10 cm med sårpude, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802015 | 9 x 15 cm med sårpude, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802016 | 10 x 20 cm med sårpude, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802017 | 10 x 12 cm med sårpude, 50 stk./pk., 1200 stk./stor pk. |
| 802018 | 10 x 25 cm med sårpude, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |
| 802019 | 10 x 30 cm med sårpude, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |
| 802020 | 10 x 35 cm med sårpude, 50 stk./pk., 750 stk./stor pk. |