

Infyna Chic™ Intermittent kateter

Infyna Chic™ kateter är en hydrofil tappningskateter avsedd för kvinnor som utför ren intermittent kateterisering (RIK). Det är en diskret, ergonomisk och användarvänlig kateter.

Egenskaper

- Klar att användas direkt
- Det uppfällbara locket kan öppnas och stängas med en hand
- Lätt att greppa och ta ur behållaren även vid nedsatt handfunktion
- Katetern är stabil och stadig vilket gör den lätt att föra in i uretra
- Efter användning är styckförpackningen helt återförslutningsbar
- Konnektorn har vedertagen färgkod
- Jämn och slät hydrofil yta för en skonsam kateterisering
- Polerade skonsamma kateterögon
- Uppsamlingspåse kan kopplas utan att katetern tas ut ur behållaren




Material





- Kateter: TPE (Termoplastisk elastomer)
- Aktiveringsvätska: Steril vattenbaserad aktiveringsvätska med glycerol
- Ytbeläggning: PVP
- Styckförpackning: Polypropen

Fri från PVC, ftalater och latex

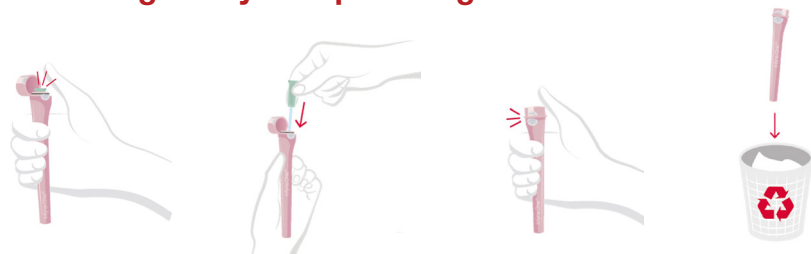


Hantering av styckförpackning



Storlek (Charriere)	Kateterns totala längd	Effektiv längd*	Spets	SKU	Antal per kartong
 8 Ch	14 cm	10 cm	Nelaton	7008	30
 10 Ch	14 cm	10 cm	Nelaton	7010	30
 12 Ch	14 cm	10 cm	Nelaton	7012	30
 14 Ch	14 cm	10 cm	Nelaton	7014	30

*Längd exklusive konnektor

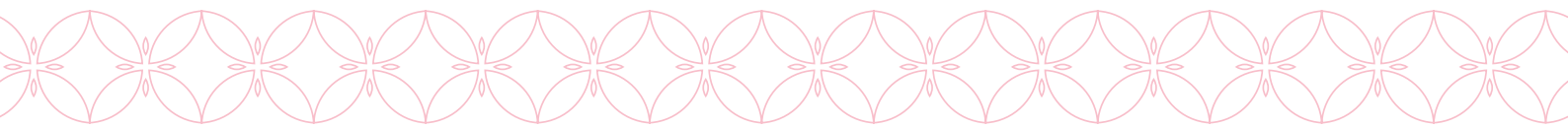

Varning: Använd inte om förpackningen är skadad eller öppnad. För att minska risken för infektioner och andra komplikationer får du inte återanvända produkten. Om obehag eller något tecken på skada förekommer ska du sluta använda produkten och rådfråga din läkare. Försiktighetsåtgärder: Rådfråga din läkare innan du använder produkten om något av följande tillstånd förekommer: Skadad uretra, oförklarad blödning i uretra, tydlig förträngning, falsk passage, uretrit – urinrörsinflammation. Självkateterisering ska följa vårdplanen och rådgivningen från din läkare och enbart utföras enligt de tillhandahållna bruksanvisningarna. Eftersom kateteriseringsfrekvensen varierar per person bör den rekommenderade frekvensen för din kateterisering tillhandahållas av din läkare. Om du har andra frågor om kateteriseringen ska du kontakta din läkare.

Viktigt! Förvara förpackningarna liggandes och vid normal rumstemperatur. Om du behöver hjälp med produkterna kontaktar du sjukvården. Kontakta din lokala distributör eller tillverkaren, samt lokal behörig myndighet, om en allvarlig personskada (incident) skulle inträffa i samband med användningen av produkten. För mer information, se www.hollister.com/authority eller kontakta EC-representanten eller den lokala distributören.

CE Före användning, var noga med att läsa användarinstruktionerna för information om avsedd användning, kontraindikationer
0050 försiktighetsåtgärder och instruktioner. Hollister, Hollisters logotyp och Infyna Chic är varumärken som tillhör Hollister Incorporated.
©2023 Hollister Incorporated. SE-00159.