


# Suprasorb<sup>®</sup> H

## Hydrokolloid – til behandling af lidt eller middel sekrerende sår

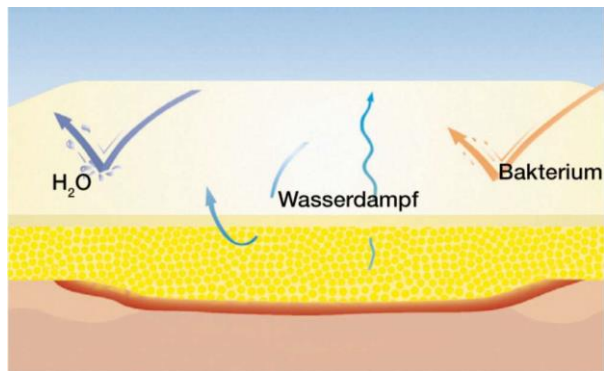

### Produktet:

Suprasorb H er en Hydrokolloid til behandling af lidt eller middel sekrerende sår.

Hydrokolloiden har en god sugeevne til behandling af ikke inficerede sår, den absorberer væske samtidig med at forbindingen bibeholder et fugtigt sårklima.

Suprasorb H er vanddamp gennemtrængelig, men bakterie og vandafvisende. Det er muligt at gå i bad med forbindingen.

Suprasorb H hæfter på huden, er nem at applikere, fleksibel og tilpasser sig såret såvel som de dele af kroppen, der er svære at komme til.

Suprasorb H klæber ikke til såret, den er nem at skifte og uden risiko for at ødelægge den nye granulation. Har en hudvenlig acrylat læbemasse.

### Anvendelse:

Suprasorb H anvendes ved overflade sår, ulcus cruris, decubitus, 1. og 2. forbrændinger samt til steder, hvorfra der er udtaget hud til transplantation.

Suprasorb H kan sidde i op til 7 dage uden at blive skiftet, alt efter hvad såret tillader.

Suprasorb H skal ikke fikseres.

### Sortiment:

Suprasorb H - Hydrokolloid  
Sterile, pakket enkeltvis

#### Standard

Størrelse (cm)	REF
10 x 10	108830
15 x 15	108831
20 x 20	108832

#### Tynd

Størrelse (cm)	REF
5 x 5	108860
5 x 10	108861
5 x 20	108862
10 x 10	108863
15 x 15	108864
20 x 20	108865

#### Sacrum

Størrelse (cm)	REF
14 x 16	108867

#### Border

Størrelse (cm)	REF
14 x 14	108866