

# Incidin® Duo

Klude til rengøring og desinfektion

**Klude med rengøringsmiddel og alkohol til rengøring og desinfektion af non-invasiv medicinsk udstyr, der efterlader overfladerne hygiejnisk rene på sekunder.**

## EN EFFEKTIV ALKOHOLBLANDING MED RENGØRINGSMIDDEL

Incidin Duo er en blanding af 70 % denatureret ethanol, 5 % isopropylalkohol og et rengøringsmiddel.

Incidin Duo er beregnet til rengøring og desinfektion af hårde overflader på non-invasiv medicinsk udstyr.†

Incidin Duo, der er testet mod en bred vifte mikroorganismer, er baktericide i 1 minut og efterlader overfladerne hygiejnisk rene uden at efterlade rester.

## STÆRKT MATERIALE

Incidin Duo bruger det nyeste inden for innovation af syntetiske materiale. Incidin Duo klude er superabsorberende og har utrolig lidt fnug.

## SPECIFIKATION

**Ingredienser:** 70 % denatureret ethanol w/w, 5 % isopropylalkohol w/w, vand, rengøringsmiddel

**Holdbarhed:** 24 måneder efter fremstilling

**Materiale:** Hvid 100 % perforeret polyesterspunlace, 50 g/m<sup>2</sup>

**Vægdispensere:** Til nem adgang, hvilket sikrer overensstemmelse

## FORDELE

**Fordoserede klude** Ingen blanding eller aktivering er påkrævet, kludene er klar til brug uden unødigt spild

**Vægdispensere:** Sikrer den rigtige klud er tilgængelige, hvor det er nødvendigt

**Hurtig desinfektionsvirkning:** Hurtig desinfektion af overflader med ekstra rengøringsevne

**Genlukkelig pakke:** Forhindrer at kludene tørrer ud



## INCIDIN DUO VIRKNINGSGRADSTABEL

EN TEST METODOLOGI	FORHOLD	KONTAKTTID
<b>BAKTERICID VIRKNING</b>		
EN 13727	Urene	1 minut
EN 16615	Rene	1 minut
EN 14561	Urene	1 minut
<b>FUNGICID VIRKNING</b>		
EN 13624	Rene	2 minutter
EN 16615	Rene	1 minut
EN 14652	Rene	2 minutter
<b>MYCOBAKTERICID VIRKNING</b>		
EN 14653	Urene	1 minut
EN 14348	Urene	1 minut
<b>VIRUCID VIRKNING</b>		
EN 14476 influenza A	Rene	1 minut
EN 14476 Norovirus	Rene	5 minutter

## PRODUKTOPLYSNINGER

PRODUKT-BESKRIVELSE	PRODUKT-KODE	STØRRELSE	ANTAL KLUDE	COLLI-STØRRELSE
Incidin Duo Maxi	3077680	300 mm x 250 mm	40 klude	15 pakker pr. colli
Incidin Duo Mini	3077700	200mm x 250 mm	50 klude	20 pakker pr. colli

LÆS ALTID ETIKET- OG PRODUKTOPLYSNINGERNE FØR BRUG.

† SSI anbefaler at rengøring og desinfektion udført som 2 separate procedurer, idet dette er mere effektivt til at fjerne mikroorganismene end rengøring alene, desinfektion alene eller rengøring og desinfektion i en og samme procedure.