



Tubi-Trak



Produktbeskrivelse og tilsigtet brug:

Pålidelig fiksering af forskellige typer katetre, sonder, slanger og dræn. Består af en pude af polyurethanskum belagt med et hudvenligt akrylatklæbemiddel og vinger, der fastgøres omkring den genstand, der skal fastgøres. Disse kan åbnes og lukkes igen, så det er muligt at ændre slangen, sonden eller drænets placering, uden at skulle skifte hele produktet. Vandfast.

Forholdsregler:

- Bør ikke anvendes gentagne gange på samme sted, da det kan give skader på huden.
- Bør ikke anvendes gentagne gange på sart hud

Advarsel:

Brug ikke fikseringstapen, hvis patienten er allergisk over for nogen af tapens komponenter, herunder klæbemidlet.

Påføring:

Påfør fikseringstapen på huden på det sted, hvor der er behov for fiksering, ved at løsne beskyttelsespapiret og stryge puden på plads. Form vingerne på oversiden rundt omkring det, der skal fastgøres, løsn beskyttelsespapiret, og fastgør vingerne. Vingerne kan åbnes og lukkes igen, hvis der er behov for ændre placeringen af det fikserede. Hvor ofte fikseringstapen skal udskiftes afhænger af anvendte praksis og hudens tilstand.

Varenummer	Beskrivelse
803018	Tubi-Trak fikseringstape, 100 x 37 mm, 50 stk./pakke, 500 stk./kasse



ViTri Medical AB Tlf.:
Stensåtravägen 9A
SE-127 39 SKÄRHOLMEN
Sverige

+46 8-747 76 60
info@vitri.se
vitri.se