

plum

Plum Kirurgisk
hånddesinfektion 85% +
0,5% klorhexidin

Hånddesinfektion



Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion 85% i flydende form.

Anvendelsesområde

Produktegenskaber

Brugsanvisning

Bemærkning

Indhold

Til brug på operationsstuer efter kirurgisk håndvask. Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risiko for smittespredning markant.

Kirurgisk hånddesinfektion 85% findes i forskellige forpakningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpakningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.

Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i flydende form med antimikrobiel effekt. Indeholder 85% denatureret ethanol og 0,5% klorhexidin. Klorhexidin fordampes ikke, men lægger sig på huden og giver en langtidsvirkende effekt på op til 5 timer. Denatureret med 6% IPA. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Uparfumeret.

Opfylder kravene i EN14885. CEI vurderet.

Dokumenteret effekt:

- EN13727 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13624 Yeasticidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN12791 Microbicidal activity - øjeblikkelig effekt samt 3 timers vedvarende effekt ved 2 min. kontakttid.

Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk hånddesinfektion ifølge EN14885.

Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgives i hænderne, så de er fugtige i 2 minutter. Påfør evt. af flere omgange. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader, omkring håndled og underarme op til albuer.

Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk hånddesinfektion ifølge EN14885.

Ingrediens		Effekt
Denatureret ethanol	85%	Aktivt stof
Chlorhexidindigluconat	0,5%	Aktivt stof

Opbevaring	Opbevares ved 0-30°C. Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.				
Udseende og duft	Uden farve og parfume.				
Produktionsland	DANMARK				
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk .				
Emballagematerialer	Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.				
Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
	10 x 1 l	3867	5701684386729	5701684386712	Flaske
	6 x 1 l	3866	5701684386620	5701684386613	Pose
	15 x 600 ml	3863	5701684386323	5701684386316	Pumpeflaske
					
Standard tilbehør	1 l flaske:	4279 CombiPlum Tråddispenser			
	1 l pose:	4283 CombiPlum EASY dispenser 4292 CombiPlum Plast dispenser 4279 CombiPlum Tråddispenser 4203 CombiPlum Electronic dispenser			
	600 ml pumpeflaske:	4194 Dispenso vægholder 133-1 Dispenso vægholder m. arm 4197 Dispenso mobil holder			
Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .				