

- Klassificeret og Registreret som et **Medicinsk Udstyr**.
- Håndkøbsprodukt (OTC) – **ingen recept er nødvendig**.
- Indeholder oprenset, krystalliseret **CBD-isolat**, som er testet for tungmetaller, pesticider og mikrober.
- Effektivitet understøttet af prækliniske studier og kliniske forsøg.
- **Topisk** anvendelse, som tilbyder **øget biotilgængelighed** sammenlignet med den biotilgængelighed, der ses ved orale CBD-produkter.
- Kan alternativt bruges mod ledsmerter relateret til andre tilstande end gigt, såsom muskelsmerter og forstuvninger.



Fordele & Effekter

- Topisk behandling til kropsområder påvirket af gigt.
- **Kølede effekt på varme og hævede led.**
- **Smertelindring**
- **Reducerer** de smertefulde tilstande, der opstår ved **leddegigt** (reumatoid arthritis).



Hvilke Ingredienser & Hvorfor

ALKOHOL/VAND-BLANDING


- Når blandingen påføres huden, fordamper alkohol- og vandblandingen, hvilket forårsager en kølede effekt på de varme og hævede led og lindrer smertefølelsen.

KAMPER & MENTHOL

- Stimulerer den kølede og smertelindrende effekt.
- Stimulerer mikrocirkulationen, hvilket hjælper CBD med at trænge igennem hudbarrieren.

CANNABIDIOL (CBD)

- Forskning indikerer, at CBD kan reducere smerte, inflammation og knoglenedbrydning, og det kan forhindre angreb fra immunsystemet (RA).

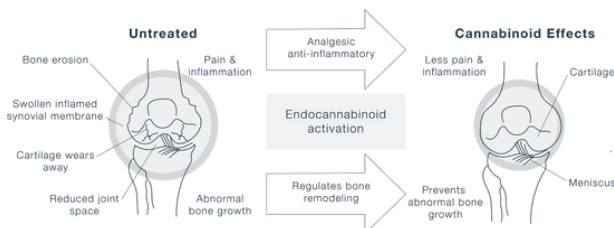

Aktive Ingredienser

Van
Denatureret ethanol 96 %

Andre Ingredienser

Menthol, Kamfer,
Cannabidiol (CBD),
Isopropylmyristat, Acrylat,
Crosspolymer, Vandig
Natriumhydroxidopløsning,
Fytinsyre

Vidste du...?

**"1,46 milliarder har
smerteproblemer
350 millioner med gigt"**



Kun til Business-to-Business brug

Virkningsmekanisme



- Hurtig fordampning af en alkohol/vand-blanding sammen med kamfer og menthol skaber en lindrende, kølende effekt på varme og hævede led.

Anvendelse & Dosering



- Gelen skal masseres ind på det berørte kropsområde flere gange om dagen.
- Dosering for hænder, håndled eller albuer er 0,25 g (på størrelse med en ært). Dosering for fod, ankel eller knæ er 0,5 g (på størrelse med 2 ærter).
- Til langtidsbrug, efterfulgt af en pause på 3-5 dage. Herefter kan behandlingen genoptages efter behov.
- Gelen skal kun påføres på ren og tør hud uden åbne sår, infektioner og udslæt.
- Må ikke påføres i kombination med andre produkter.
- Ikke egnet til børn under 12 år.
- Tuben indeholder op til 200 behandlinger.

Kvalitet & Sikkerhed Sikret




- 96 % ingredienser af naturlig oprindelse.
- Vegan.
- Patentansøgning i gang – klassificeret som et medicinsk udstyr klasse I.
- Kvalitetssikret og testet i overensstemmelse med det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (93/42/EØF/MDD).
- Overholder MDR Kapitel VII, Artikel 10 (9) (kvalitetsstyringsystem) & 85 (Post-Market Surveillance).
- I gang med opdatering i henhold til MDR Klasse IIa Regel 21.

I. ALKOHOL FORDAMPER

II. FORDAMPNINGSENERGI TRÆKKES FRA HUDEN

III. KØLENDE EFFEKT PRODUCERES

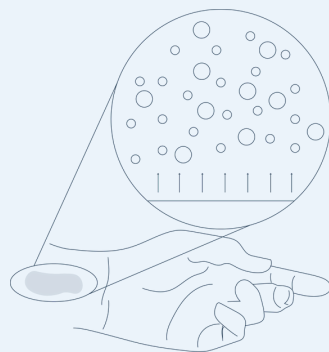

Kliniske Forsøg

89% effektiv i reduktion af ledsmerter hos patienter med slidigt*

56% effektiv i reduktion af hævelse i led*

44% effektiv i reduktion af ledstivhed*

58% effektiv i reduktion af knasende lyd i led*

63% effektiv i reduktion af VAS-score*

Der er indtil videre ikke observeret nogen bivirkninger.