



Kiilto Pro

Overfladedesinfektion

75%

Desinfektionsmiddel



Hurtig og effektiv alkoholbaseret overfladedesinfektion 75%

Anvendelsesområde

Ethanolbaseret produkt til desinfektion af mindre synligt rene overflader, der tåler alkohol. Velegnet til brug i sundhedssektoren og i fødevarerindustrien.

Kiilto Pro Overfladedesinfektion 75% findes i forskellige emballagetyper, som egner sig til forskellige formål.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Produkter har baktericidal, yeasticidal, virucidal og mykobactericidal effekt. PT2 og PT4 biocidprodukt til professionel brug.

Produktet er godkendt af CEI (intermediate level) og kan derfor anvendes i sundhedssektoren, ligesom det er godkendt af Fødevarerstyrelsen (J.nr: 2023-29-7105-00277) og derfor også kan anvendes på overflader i kontakt med fødevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

Produktet findes i følgende forpackninger:

601374 - 1000 ml flaske

Flydende desinfektionsmiddel, der er let at fordele på overfladen.

601375 - 750 ml sprayflaske

Sprayflaske med desinfektionsvæske gør det let at fordele produktet på overfladen og på steder, der er svære at komme til. Sprayhovedet danner dråber der hurtigt falder ned på overfladen og som ikke danner aerosoler i luften. Flasken er fremstillet af 100% genanvendt plast (rPET).

601377 - 150 wiper i bønne

Brugsklare servietter fugtet med desinfektionsmiddel. Servietterne er fremstillet af "Next generation highfriction Tritex" som er et blødt polypropylen materiale med særlig god evne til at frigive væsken på overfladen. Tekstur på servietten skaber god friktion mellem servietten og overfladen for maksimal effekt. Materialet indeholder 30% genanvendt plast. Det er et meget slidstærkt materiale, der ikke fnugger. De blå servietter måler 20 x 20 cm og rækker til areal på 0,5 m². Bøtten har låg med genluk der sikrer, at servietterne ikke tørrer ud.

Brugsanvisning

Anvendes på synligt rene og tørre overflader der tåler alkohol. Test på et lille ikke synligt område, hvis du er i tvivl.

Fordel/spray desinfektionsvæske på overfladen og bearbejd området grundigt med en klud/wipe, så væsken fordeles jævnt. Lad overfladen lufttørre. Overfladen skal være fugtig i henhold til den angivne kontakttid for at opnå den tiltænkte effekt.

For at skåne hænderne anbefales det at anvende handsker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Kontakttid
EN13727	Bacteria	30 sek
EN16615	Bacteria	2 min
EN13624	Yeast	30 sek
EN16615	Yeast	1 min
EN14476	Virus limited spectrum (M noro og Adeno)	30 sek
EN14348	Mykobacteria	1 min

Indhold

Ingrediens		Effekt
Denatureret ethanol	75%	Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

DANMARK

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	Forpakning
12 x 1 l	601374	7054956013747	Flaske
6 x 150 stk	601377	7054956013761	Wipes
6 x 750 ml	601375	5701684741320	Spray

**Standard tilbehør**

Bøtte med 150 wiper: 601130 Holder til wiper

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.