

Accel Heal Solo

SÅRBEHANDLING MED ELEKTRISK STIMULATION



LINDRER SMERTE, **STIMULERER HELING**

Accel-Heal Solo er en bærbar, brugervenlig enhed til engangsbrug, der leverer innovativ elektrisk stimuleringsbehandling til smertefulde og svært helende sår.

Behandlingen kan håndteres i hjemmet for at lindre smerter, fremskynde helingen og forbedre livskvaliteten.

Accel Heal Solo

SÅRBEHANDLING MED ELEKTRISK STIMULATION

Om Accel-Heal Solo

Accel-Heal Solo leverer en kontinuerlig 12-dages behandling med subsensorisk elektrisk stimulering for at hjælpe med sårheling og fremme den normale helingsproces.

Når sund hud såres, reagerer den med en bioelektrisk strøm, der kaldes "skadestrøm", der er en vigtig drivkraft i den normale sårhelingsproces. Denne skadestrøm kan være nedsat hos patienter med visse underliggende tilstande eller hos ældre mennesker, hvilket bidrager til manglende heling. Mikrostrømsbehandling med elektrisk stimulering er designet til at genoprette eller øge skadestrømmen og dermed stimulere helingsprocessen.

Vigtige funktioner og fordele

- Den lille, bærbare enhed er let at betjene, er bærbar og bør ikke forstyrre de daglige rutiner
- Den er designet til at blive brugt sammen med aktuelle sårbehandlinger som forbindinger og kompressionsbandager
- Når den er sat på og startet, leverer den automatisk et forudindstillet program med subsensorisk elektrisk stimulering til såret over en kontinuerlig 12-dages behandlingsperiode
- Behandlingssættet indeholder alt, hvad der skal bruges til den 12 dage lange behandlingsperiode: enhed, elektrodepuder, spritservietter, strop og clips, instruktionsfolder
- Under behandlingen kan patienterne forvente, at smerterne lindres. Nogle patienter rapporterer om hurtige forbedringer inden for få timer efter behandlingsstart
- Helingsprocessen og reduktionen af smerter vil sandsynligvis fortsætte længe efter, at behandlingsperioden er afsluttet

Vejledning til påsætning

1. Før du sætter elektroderne på, skal du rense huden med de spritservietter, der følger med i pakken. Sæt to elektrodepuder på sund, hel hud på hver side af og tæt på såret eller forbindingsområdet (figur 1)
2. Fastgør enheden til elektrodepuderne ved at skubbe enhedens kabelstik ind i elektrodepudernes kabelreceptorer
3. Tryk på start/pause-knappen og hold den nede i to sekunder for at aktivere enheden (figur 2)
4. Når enheden er aktiveret, kører den automatisk en 12-dages sekvens af elektrisk stimuleringsbehandling. Når behandlingen er afsluttet, holder LED'en op med at blinke, og enheden slukker af sig selv. Enheden og elektrodepuderne skal fjernes og bortskaffes

PRODUKTKODE: K560-1


Sikring af enheden

Enheden leveres med en aftagelig clips og en strop, der kan føres gennem clipsen for at fastgøre enheden (figur 3). Bind stroppen rundt om låret eller skinnebenet, og brug velcrobåndene til at fastgøre stroppen i den ønskede position (figur 4). Hvis stroppen sættes direkte på huden, skal du sørge for, at silikonelinjen er i kontakt med huden. Når den er fastgjort, skal du sørge for, at den ikke giver patienten ubehag ved bevægelse eller trykker på huden under hvile.

Indikationer

Sår, der ikke heler som forventet, eller hvor smerter begrænser patientens mobilitet eller tolerance over for andre sårbehandlinger som f.eks. kompressionsbehandling.

Egnede sår omfatter svært helende sår som venøse bensår, diabetiske fodsår, tryksår og arterielle insufficienssår samt akutte sår med forsinket heling som f.eks. forbrændinger og rumperede postoperative sår.

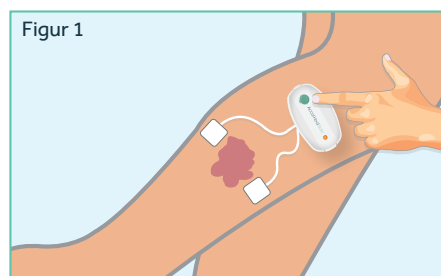

Læs altid brugsanvisningen, før du anvender Accel-Heal Solo. Scan denne QR-kode for at se vores "sådan bruger man"-videoer

Kontraindikationer

Hjertesygdomme

Anvend ikke Accel-Heal Solo på brystet hos patienter med hjertearytmier eller hjertesvigt.

Implanterede elektroniske enheder

Anvend ikke Accel-Heal Solo på brystet, hvor elektrisk stimulering kan forårsage funktionsfejl i indopererede pacemakere eller stød fra indopererede defibrillatorer.

Graviditet

Må ikke anvendes på lænden eller maven hos gravide kvinder.

Patienter med kræft i såret

Må ikke anvendes i områder med kendt eller mistænkt kræft i såret eller tilstødende væv.

Epilepsi

Må ikke anvendes på hals- eller hovedregionen hos personer, der er kendt for at have anfald.

Aktiv dyb venetrombose

Må ikke anvendes på personer med aktiv dyb venetrombose eller tromboflebitis (Accel-Heal Solo kan anvendes på personer, der tidligere har haft dyb venetrombose og er blevet behandlet med antikoagulantia).



Fremstillet af:
Accel-Heal Technologies Limited, Hever Business Centre,
Hever, Kent, TN8 7ER, England, UK.
Tlf: +44 (0)1959 569 433
E-mail: customerservices@accelheal.com
www.accelheal.com

ONEMED

Accel-Heal Solo sælges og markedsføres
i Danmark af OneMed Danmark AS
www.onemed.com