

Embra[®] AmpSnap ampulbryder

REF: 111003, 152503

Embra[®] AmpSnap er en mekanisk ampulknækker beregnet til åbning af glasampuller. Det er et simpelt håndholdt værktøj designet til nemt at åbne glasampuller med en simpel knækbevægelse på toppen af ampullen. Ved åbning indkapsles glassplinterne inde i AmpSnap og bortskaffes samlet i beholderen til skarpe genstande, hvilket reducerer risikoen for snitsår på fingrene. Embra[®] AmpSnap er beregnet som et værdifuldt værktøj for sygeplejersker, farmaceuter og klinikere og tilbyder hurtig og præcis åbning af ampuller. Ampulknækkeren er et engangsprodukt i plast, der fås i to størrelser. Glasampullerne åbnes sikkert ved at knække dem.

Egenskaber

- ▶ Kompatibel med ampulstørrelser 1-10 ml og 15-25 ml
- ▶ Forbedret design med ribbet indre væg for skridsikkert ampulgreb
- ▶ Dobbelt-ende design, der tillader valg af optimal pasform til ampulens top
- ▶ Brudt glasampul top fastholdes for sikker bortskaffelse
- ▶ Fremstillet af mindst 70% biobaseret plastindhold, testet i henhold til ASTM D 6866
- ▶ Produktemballage lavet af FSC[®] Mix genanvendt fiber




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
111003	AmpSnap ampulbryder, Hvid	1-10 ml	100 / 10000
152503	AmpSnap ampulbryder, Hvid	15-25 ml	70 / 7000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

N/A

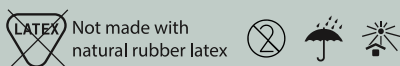

REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Lovmæssige krav:

N/A

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Termoplastisk elastomer af typen TPS-H med mindst 70% biobaseret kulstofindhold

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	105 x 84 x 73
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	535 x 345 x 379
Pakketape	N/A	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
111003	N/A	6438129800029	6438129800036
152503	N/A	6438129800042	6438129800050

Embras mission er at udvikle ansvarlige sundhedsløsninger med fokus på at mindske miljøpåvirkningen, samtidig med at kvaliteten for patienter og plejepersonale øges. Sammen kan vi gøre en positiv forskel - så tak fordi du valgte Embra.