

easy-slide

another Arion brand

Easy-Slide® Arm

Den ultimative løsning til påtagning af armstrømpe



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og afgang af armstrømper, en slidsom og møjsommeligt proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og afgang medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for, om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Easy-Slide Arm er designet specielt til at løse alle udfordringerne omkring påtagning af armstrømper. Påtageren er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og dobbeltlagsfunktionen et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen væsentligt ved påtagning. Den nedsatte friktion ved brug af Easy-Slide Arm betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger.

Målgruppe

Easy-Slide Arm er den oplagte løsning for patienter, der bruger armstrømper. Takket være Easy-Slide Arm kan armstrømpen tages på med største lethed. Desuden er Easy-Slide Arm et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den anstrengende opgave dagligt at påføre armstrømper på deres patienter.

Easy-Slide® Arm

Den ultimative løsning!

Produktfordele

- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og patienter
- Øger patientens uafhængighed og behandlingseffektivitet
- Armstrømpen bevarer sin kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt

Sortiment

Art. code	Størrelse	længde
E01505	arm medium	55,5 cm
E01506	arm large	62,5 cm



Træk Easy-Slide arm på armen



Tag armstrømpen uden på Easy-Slide arm



Skub og træk armstrømpen på plads



Træk derefter Easy-Slide arm ud af strømpen med små