

Operationsmaske

REF 2853 (Vnr. 940007)

Page 1 (2)

Version: 10.01.2014, rev 3

Printed: 27.2.2017

REF/Vnr.	Farve/str.	Fiksering	
2853/ 940007	Hvid, bredde: 19 cm	Bindebånd	
<p>Klassificeret som type IIR i henhold til EN14683:2014 Europæiske standard for Operationsmasker</p> <p>Bakteriel Filtrerings Effektivitet (BFE) >98%</p> <p>[NATURAL LATEX FREE]</p> <p>Påtagning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form næseklemmen. Placer masken så den dækker næse og mund 2. Placer det øverste bindebånd bag på hovedet (se billede) og bind stramt. 3. Træk det nederste bindebånd rundt om nakken og bind stramt. 4. Fold masken <u>helt</u> ud og ned over hagen. 			
<p>Rå materialer: 1st ydre dækmateriale 2nd ydre dækmateriale Filter Indre dækmateriale Næse wire/tråd Bindebånd Ydre antidug Indre antidug</p>			<p>spunbond polypropylen, hvid spunbond polypropylen, hvid meltblown polypropylen, hvid hydrofilt væv, hvid PE-coated galvaniseret wire/tråd spunbond polypropylen, hvid laminat hvid spunbond polypropylen/transparent polyethylen laminat hvid spunbond polypropylen/transparent polypropylen</p>
<p>REACH regulativer:</p>			<p>Produktet som omfattes af dette datablad indeholder ikke cancerfremkaldende, mutagene eller giftige substanser. Det inkluderer heller ikke nogen af de emner, der er nævnt i (SVHC) (Substances of Very High Concern) som er listet i den seneste version af kandidatlisten publiceret af ECHA (European Chemicals Agency).</p>
<p>Egenskaber:</p>			<p>En type IIR ekstra bred operationsmaske med horisontale bindebånd, som minimerer risiko for lækage. Stænkresistent og med anti-dug, blødt lag inderst for større komfort. Anbefales til våde indgreb, hvor der er risiko for stænk.</p>



Operationsmaske
REF 2853 (Vnr. 940007)

Page 2 (2)

Version: 10.01.2014, rev 3

Printed: 27.2.2017

Forpakning:	50 stk/dispenser, 6 dispensere á 50 stk (= 300 stk)/karton
Dispenser:	Pap 220 x 110 x 130 mm
Transportkarton:	Pap 280 x 232 x 345 mm
Salgsenhed:	Transport carton (6 dispensers of 50 pcs)
I overensstemmelse med legale krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klasse I
Compliance med produkt standarder:	EN 14683:2014, Type II R
Kvalitetsstandarder:	Produktet er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001, ISO 13485
Mærkning:	I overensstemmelse med EN ISO 15223-1 and EN1041
Anbefalet opbevaring:	Opbevares rent og tørt ved stuetemperatur. Bør ikke udsættes for direkte sollys eller andre intensive lyskilder eller ozon.
Affaldshåndtering	Følg lokale retningslinjer
Risiko hvis genanvendt:	Produktet er beregnet til engangsbrug. Hvis genanvendt kan produktets performance falde og krydskontaminering kan opstå.

Produkt	Dispenser	Transportkarton
REF 2853	6438129315622 2853 dispenser  6 438129 315622	6438129515626 2853 carton  6 438129 515626