

Cellona[®] gipsbandage



Produktet:

Gips af fineste α - og β -halvhydrat, fikseret på 17-trådet gaze og forarbejdet til færdige gipsbind.

Cellona gipsbind gennemfugtes hurtigt og ensartet ved dypning i vand i kort tid. Gipsen er uovertruffen fincremet og er nem at modellere. Gennemhærdede Cellona bandager har en høj brudstyrke, har en glat overflade og er gennemtrængelige for røntgenstråler.

Anvendelse:

Den korrekte vandtemperatur for dypning af bindene ligger mellem 20° til højst 25° C.

Bindet fattes med let hånd og dyppes skråt helt ned i vandet. Vandet trykkes ud igen med let hånd.

Cellona-gipsbandager er velegnede til fiksering efter frakturer såvel som knogle- og led operationer, ved ortopædisk korrigering, ved behandling af knogle- og led- sygdomme samt ved flegmonøse betændelses tilstande i bløddele.

Gipsbindende kan ligeledes anvendes i forbindelse med modellering af figurer og masker.

2 m, pakket individuelt

Størrelse (cm)	Antal	REF
8 cm	1	20 111
10 cm	1	20 112
12 cm	1	20 113
15 cm	1	20 114
20 cm	1	20 115

Sortiment:

2 m, pakninger a 5 stk.

Størrelse (cm)	Antal	REF
6 cm	60	25 400
8 cm	60	25 401
10 cm	40	25 402
12 cm	40	25 403
15 cm	40	25 404
20 cm	40	25 405

2,7 m, pakket individuelt

Størrelse (cm)	Antal	REF
5 cm	12	91 380
7,5 cm	12	91 381
10 cm	12	91 382
12 cm	12	91 383
15 cm	12	91 384
20 cm	12	91 385

3 m, pakninger a 5 stk.

Størrelse (cm)	Antal	REF
8 cm	40	25 411
10 cm	40	25 412
12 cm	40	25 413
15 cm	40	25 414
20 cm	30	25 415

4 m, pakninger a 5 stk.

Størrelse (cm)	Antal	REF
8 cm	40	25 421
10 cm	40	25 422
12 cm	30	25 423
15 cm	20	25 424
20 cm	20	25 425

1 m, pakket i aluminium folie

Størrelse (cm)	Antal	REF
5 cm	10	24 999