

# Tensocold® Pack

## HURTIG NEDKØLING

Tensocold® Pack er en engangsprodukt, til lokal smertelindring og effektiv kuldebehandling i op til 30 minutter. Produktet indeholder karbamid og vand, forseglet i en indre pose.

### Let og enkel

- Let at anvende og kan anvendes umiddelbart – skal ikke køles eller fryses.
- Pakningen aktiveres ved at man klemmer den og ryster pakningen. Den kan anvendes umiddelbar efter.
- Effektiv kuldebehandling i op til 30 minutter.

### Primære anvendelsesområder

Kuldebehandling til blå mærker, forstuvninger og forstrækninger, hedeslag, feber og trauma. Nedkøling for at lindre smerten og begrænse evt blødning i vævet.

### Brugsanvisning

1. Klem posen med fast hånd, så vandet i inderposen frigives.
2. Mix blandingen for at sikre max. køling. Brug altid noget beskyttende stof mellem kølepose og huden for at undgå forbrændinger.
3. Til engangsbrug. Kasseres efter anvendelse.

### Note

- Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes direkte på sår.
- I tilfælde af cirkulatoriske sygdomme eller overfølsomhed i huden, må produktet kun anvendes efter medicinsk rådgivning.
- Hvis indholdet kommer i kontakt med hud eller øjne, skylles straks med vand i 15 minutter og en læge kontaktes. Hvis produktet indtages, drikkes ½ liter varmt vand, fremkaldt ikke opkastning, men kontakt læge.
- Anvend kun posen, hvis den er hel. Pakningen må ikke åbnes eller punkteres. Kasseres efter lokale foreskrifter
- Opbevares tørt og køligt

### Material

Karbamid (urea) og vand.



## BESTILLINGSINFORMATION

Art nr	Størrelse	Antal/forp
47423-02	14,5 cm x 24 cm	24

Essity Denmark A/S  
Gydevang 33  
DK-3450 Allerød

Tlf: 4816 8220  
kundeservice.dk@essity.com  
www.essity.dk

10/2022  
7026\_1121

 **essity**