

# Transafix<sup>®</sup>

OPTIMALE FIKSERINGSLØSNINGER



**ENKEL • SIKKER FIKSERING • HØJ BÆREKOMFORT**

## **Transafix**

En skånsom, effektiv og fleksibel løsning til fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidssiksering.

- Høj bærekraft – fikseringstapen, Transpore® er åndbar, blød og formbar
- Sikker og justerbar fiksering
- Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering
- Enkel i brug
- Hudvenlig hypoallergen klæber
- Minimerer risiko for stripping af huden
- Latex og PVC-fri
- Omkostningseffektiv



## Transafix Trachealtubesæt

### Fikseringsystem til endotrachealtuber



Transafix trachealtubesæt er en effektiv løsning, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidsfiksering af endotrachealtuber.

Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering af tuben, og er derfor omkostningseffektiv i brug.

Sættet består af 2 kindplastre med velcro, samt et tubebånd med en klæbende flade.


Kindplastrene er fremstillet af en blød og fleksibel nonwoven overside med en velcroflade.

Tubebandet er 16 mm bredt og 40 cm langt og har en klæbende flade på midten.

Kan sidde på i op til 7 dage - kan anvendes til både børn og voksne.

## Transafix Fikseringstape

### Fiksering til sonder, katetre og dræn

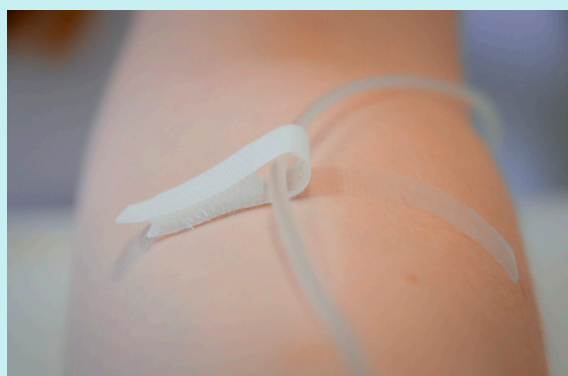

Fikseringstapen er en skånsom, effektiv og fleksibel løsning til fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidsfiksering.

En løsning til alle slangestørrelser – fås i 3 størrelser.

Fikseringstapen placeres på huden, slangen fastgøres på den klæbende flade på oversiden og velcro-vingerne lukkes omkring slangen.

Velcroen kan nemt åbnes igen og slangen genplaceres/skiftes.

Minimerer risikoen for stripping af huden.

Kan sidde på i op til 7 dage - kan anvendes til både børn og voksne.

## Transafix Nasal fiksering

### Fiksering til nasale og gastriske sonder



Transafix Nasale Fikseringssystem tilbyder en perfekt løsning, når sonden skal fikseres sikkert på patientens næseryg.


Sættet består af to dele; det nasale plaster - fås i beige nonwoven eller hydrokolloid - og den nasale fikseringstape.

Sonden fastgøres med den nasale fikseringstape - på den måde er det kun fikseringstapen, der skal udskiftes når sonden udskiftes, hvilket reducerer hudirritationer og stripping af huden.

Kan sidde på i op til 3-5 dage: Nonwoven i 3 dage, hydrokolloid i 5 dage. Fikseringstape efter behov.

# Specifikationer

| Apodans Varenr. | Beskrivelse                              | Stk pr. æske |
|-----------------|--|--------------|
| 8210100         | Nasal plaster - hydrokolloid, usteril    | 50 stk.      |
| 8210200         | Nasal plaster - nonwoven, beige, usteril | 50 stk.      |
| 8210300         | Nasal fikseringstape, usteril            | 100 stk.     |

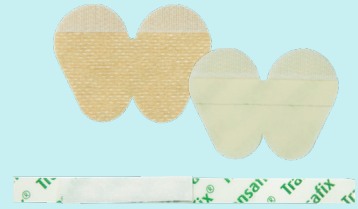

| Apodans Varenr. | Beskrivelse                                 | Stk pr. æske |
|-----------------|---|--------------|
| 8700150         | Fikseringstape nr. 1, 1,5 x 7,5 cm, usteril | 100 stk.     |
| 8700250         | Fikseringstape nr. 2, 3 x 9 cm, usteril     | 50 stk.      |
| 8700350         | Fikseringstape nr. 3, 4,5 x 15 cm, usteril  | 25 stk.      |



| Apodans Varenr. | Beskrivelse                                    | Stk pr. æske |
|-----------------|--|--------------|
| 8700600         | Trachealtubesæt:<br>2 kindplaster + 1 tubebånd | 50 sæt       |
| 8700700         | Kindplaster, parvis                            | 50 par       |
| 8700800         | Tubebånd                                       | 50 stk.      |

