

MyLife Clickfine Penkanyle 32G (0,23 x 4mm)

Beskrivelse:

MyLife Clickfine Diamond penkanyle skal anvendes sammen med en insulinpen. Penkanylen har en seksfacetteret nålespids letter indtrængen i huden, minimerer vævsskader og optimerer således injektionen. Inden insulinen injiceres, skal du kontrollere, at der er fri passage igennem nålen. Dette gøres ved at indstille dosisvælger på en eller to enheder og sprøjte insulinen ud i luften. Derefter indstilles dosisvælger til den ønskede mængde insulin. Forpakningsstørrelse: 100 stk. Kanylélængde: Se specifikationer nedenfor. Diameter: Se specifikationer nedenfor. Påsætning: Kanylen sættes og twistes på pennen. Kanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det at kanylen skiftes efter hver injektion. Passer til mange insulinpenne på markedet, bl.a.: NovoPen og NovoPen Echo. Kanylen er steril og silikonebelagt. CE mærket: ja. Vigtigt: Skal du bruge kanyler for første gang bør størrelsen samt injektionsteknik udelukkende vælges ud fra en anbefaling fra enten din læge eller diabetessygeplejerske. Ønsker du at skifte størrelse på nålen bør du konsultere din læge eller diabetessygeplejerske.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
946117	100 stk.	70000481

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

32

Længde:

4

Diameter:

0,23

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED