

## Ansiktsskydd Visir flergångs PPE II

Lev. art nr           23670120  
Förpackning       100 st



### Produktinformation

Ansiktsvisir som skyddar mot stänk och droppar av vätska. Visiret uppfyller kraven som personligt skydd, i kategori II, enligt EN-166.

Visirglas och skyddets utsida kan rengöras och desinficeras med alkohol.

Dock kan inte skummet rengöras och desinficeras.

Inom hälsa och sjukvård och i samband med skydd mot smitta skall **skyddet vara personligt** och inte delas mellan vårdgivare/brukare. Visiret har ett namnfält för att skriva i med markeringspenna.

Visiret skall kasseras om det blivit repigt eller om skummet blivit smutsigt.

Användarinstruktioner:

1. Ta bort skyddsfilm
2. Spänn huvudbandet enligt något som känns bekvämt på huvudet
3. Knäck den flärpen bakåt som sticker ut för att låsa fast huvudbandet