



DES +72

Ytdesinfektion med tensid

Användningsområde

DES +72 är en flytande etanolbaserad ytdesinfektion. Alkoholhalten är 75 vol%. Den används i koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning (bakterier, svamp, virus) via ytor. Tillsats av tensid ökar alkoholens kontakt med ytan. pH 6-9.

Produkten lämpar sig för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod etc. alltså smutsiga ytor

Produktfakta

Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virustyper. Den är testad och uppfyller blanda de skall krav som föreligger i SS-EN 14885: 2018 för en ytdesinfektion med eller utan mekanisk bearbetning inom ett medicinskt verksamhetsområde samt bactericidala och fungicidala krav på ytor associerade med industri, hem och institution.

EN 13624 Candida albicans
 Aspergillus brasiliensis

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa
 Staphylococcus aureus
 Enterococcus hirae

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa
 Staphylococcus aureus
 Enterococcus hirae
 Escherichia coli
 Candida albicans

EN 16615 Pseudomonas aeruginosa
 Staphylococcus aureus
 Enterococcus hirae
 Candida albicans

EN 1276 Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli

EN 1650 Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

Dessutom är produkten testad och uppfyller effekt mot flera virus med och utan hölje enligt EN 14476:

EN 14476	Murin noro	smutsiga betingelser
	BVDV (surrogat för Hepatitis C)	rena betingelser
	Vaccinia	rena betingelser
	Adeno	rena betingelser

Effektiv mot höljeförsedda virus såsom Corona virus och SARS-CoV-2.

Art.Nr

Art.nr 17230001	Antal per kartong: 12* 1L	1L flaska med snäppkapsyl
Art.nr 17239300	Antal per kartong: 24* 300ml	300ml flaska med snäppkapsyl
Art.nr 17230005	Antal per kartong: 2* 5L	5L dunk med kapsyl

Bruksanvisning

Vid svår nedsmutsning skall ytan som skall desinficeras först torkas av med en trasa och rengöringsmedel. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras, stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Om ytan är mindre kan desinfektionsmedlet appliceras på torkduken. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minst 1min, generell verkningstid 1-5 minuter. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Hantering av produkt och emballage

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader.

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast".

Innehåll

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, tensid

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

