



ViTri:Sipro

Produktbeskrivelse:

ViTri:Sipro er et gennemsigtigt perforeret sårkontaktlag af polyuretanfilm belagt med silikonegel. Sårkontaktlaget er ikke-absorberende og gør det muligt for sårvæsken at passere gennem den perforerede struktur til en absorberende yderbandage. Bandagens opgave er at mindske risikoen for, at den absorberende yderbandage sidder fast i såret, og det gør det nemmere at skifte yderbandagen. Hyppigheden af skift af yderbandagen afhænger af sårets tilstand og mængden af sårvæske, og den sekundære bandage bør skiftes så ofte, det er nødvendigt for at forhindre maceration. Den ikke-klæbende side af bandagen gør det muligt også at bruge bandagen alene til beskyttelse af fx skrøbelig eller beskadiget hud.

Indikationer:

Bandagen er beregnet til brug som sårkontaktlag til en bred vifte af forskellige væskende sår, fx kirurgiske sår, andengradsforbrændinger, transplantationssår, hudafskrabninger, tryksår, rifter, traumatiske sår, vabler, fod- og bensår, under kompression samt til beskyttelse af skrøbelig hud.

Kontraindikationer:

Lad være med at bruge bandagen, hvis patienten er allergisk over for et eller flere af bandagens bestanddele. Hvis bandagen anvendes til forbrændinger, hvor der er foretaget transplantation eller ansigtsgenopbygning, kan der forekomme mærker/aftryk, hvis bandagen ikke anvendes korrekt.

Hyppighed af bandageskift:

Bandagen kan blive siddende, så længe eksudatet kan passere frit til en absorberende yderbandage. Hyppigheden kan dog variere afhængigt af de lokale retningslinjer, der følges.

Påsætning:

- Vælg en størrelse, der dækker såret og overlapper mindst 2 cm af den omgivende raske hud.
- Kan ved behov klippes til den ønskede størrelse, inden beskyttelsesfilmen fjernes. Vælg en større bandage i stedet for flere overlappende små bandager. Bandagen vedhæfter dårligere ved overlapninger.
- Tag fat i beskyttelsespapirets to flige og træk dem fra hinanden. Fjern forsigtigt en del af beskyttelsesfilmen. Sæt midten af bandagen på såret, før du fjerner resten af beskyttelsesfilmen.
- Tryk forsigtigt på bandagen for at sikre, at den sidder fast på den omgivende hud.
- Kontrollér, at bandagen ikke strammer på huden. Om nødvendigt kan hele eller en del af bandagen løsnes og sættes på igen. Ved behov kan der påføres gel under eller oven på bandagen.
- Påsæt ved behov en sekundær absorberende bandage oven på sårkontaktlaget. Fiksér den sekundære bandage på egnet vis, hvis den ikke har nogen fiksering.

Varenummer	Beskrivelse
804001	5 x 7,5 cm, S, 10 stk./afdpk., 800 stk./trppk.
804002	7,5 x 10 cm, S, 10 stk./afdpk., 400 stk./trppk.
804005	10 x 12 cm, S, 10 stk./afdpk., 200 stk./trppk.
804003	10 x 18 cm, S, 5 stk./afdpk., 200 stk./trppk.
804004	20 x 30 cm, S, 3 stk./afdpk., 120 stk./trppk.