

A12t DILUTUS® 80%

Lievästi denaturoitu etanoliliuos

EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14561 • EN 14562

Tehokas, turvallinen ja nopea desinfektioaine puhtaille ja kuiville pinnoille. Kirkas ja lähes tuoksuton lievästi denaturoitu etanoliliuos, joka haihtuu nopeasti.

Käyttökohteet

A12T Dilutus 80 % desinfiointiliuos soveltuu terveydenhuollon ei-invasiivisten välineiden ja laitteiden desinfiointiin sekä ihon desinfektioon ennen injektioita, näytteenottoa tai muuta invasiivista toimenpidettä.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei limakalvoille
- Ei materiaaleille, jotka eivät siedä alkoholia

Mikrobisidinen teho

Etanoli tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja useimmat virukset. Poikkeuksen muodostavat bakteeri-itiöt ja vaipattomat virukset, joihin etanoli ei sellaisenaan tehoa.

A12t Dilutus 80 % on testattu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaan ja se täyttää niiden asettamat vaatimukset:

- EN 1500 Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Käyttöohje

Käytetään puhtaalle, kuivalle pinnalle tai iholle. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon sekä ennen invasiivisia toimenpiteitä sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Ei-invasiiviset välineet ja laitteet desinfioidaan riittävällä määrällä liuosta ja annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaan.



Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät ja EAN

| | | | |
|----------|----------------|-----------|---------------|
| 13221122 | 100 ml pullo | ME 16 kpl | 6414504294737 |
| 13221124 | 500 ml pullo | ME 12 kpl | 6414500007065 |
| 13221126 | 1 L pullo | ME 12 kpl | 6414500007058 |
| 13221132 | 5 L kanisteri | ME 3 kpl | 6414504139847 |
| 13221142 | 10 L kanisteri | ME 1 kpl | 6414500007157 |

Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Tuote säilyy oikein varastoituna viisi vuotta avaamattomana ja kaksi vuotta avattuna. Säilytetään varastossa pystyasennossa.

Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoa turvallisuudesta käyttöturvallisuustiedotteessa.

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset on valmistettu PE-HD-muovista lukuun ottamatta 100 ml pulloa, jonka materiaali on PET-muovi. Molemmat materiaalit ovat ympäristöystävällisiä, kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Pakkausten ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Koostumus

Etanoli (denat. A12t®) 85,5 t-% / 80 p-%
Aqua ad 100%

20180627