

Desinfektol® P

Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14476 (noro) • EN 14561 • EN 14562



Desinfektol P on etanolipohjainen tehokas desinfektioaine lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden, terveydenhuollon hoitoympäristöjen pintojen sekä ihon desinfektioon ennen pieniä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Ei preoperatiiviseen käyttöön.

Käyttökohteet

Desinfektol P on mikrobisidisesti tehokas desinfektioaine, joka tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja useimmat virukset. Tuotteen pH on neutraali eikä se sisällä hajusteita tai väriaineita. Desinfektol P sopii sellaisenaan alkoholeja kestävien materiaalien desinfektioon kaikkialla terveydenhuollossa, hammashuollossa ja hoivakodeissa. Sillä voidaan desinfioida mm. verenpainemittarit, mansetit, stetoskoopit kalvopäineen, kuumemittarit sekä ei-invasiiviset välineet valmistajan ohjeen mukaan.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei ennen preoperatiivista toimenpidettä
- Ei saa käyttää instrumenttien kemialliseen desinfektioon liottamalla
- Ei kosteille pinnoille
- Ei sovellu käsien desinfiointiaineeksi

Mikrobisidinen teho

Desinfektol P täyttää seuraavien eurooppalaisten standardien asettamat vaatimukset:

Bakteerit

- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/2)

Homeet ja hiivat

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/2)

- EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/2)

Virukset

- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)

Käyttöohje

Käytetään esipuhdistetuille ja kuiville pinnoille. Kaada Desinfektol P:tä käsiteltävälle pinnalle tai kostuta kertakäyttöinen pyyhe kosteaksi Desinfektol P:llä.

Pyyhi desinfiotava väline, pinta tai iho huolellisesti. Varmista, että pinta on kauttaaltaan märkä. Huomioi pyyhkeen riittävä kosteus. Jos pyyhe tuntuu kuivalta, etanoli on haihtunut eikä tehoa.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Huoneenlämmössä 5 vuotta suljettuna ja avaamisen jälkeen 2 vuotta. Eristettävä sytytyslähteistä. Säilytettävä pystyasennossa. Tuote suljettava huolellisesti käytön jälkeen ja varastoidaan pystyasennossa. Säilytä valolta suojattuna.

Turvallisuus

Tuote ei sovellu käytettäväksi yhdessä saippuan tai anionisen pintaaktiivisen aineen kanssa. Tuote ei sovellu etanolia tai bentsalkoniumkloridia kestävämmille pinnoille.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesiliöille. Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna ja suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta ja muilta sytytyslähteiltä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto vedellä usean minuutin ajan.

Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

20220322

Desinfektol® P

Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14476 (noro) • EN 14561 • EN 14562



Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ovat PE-HD muovia ja 100ml pullo PET-muovia. Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Myös pumppu metalliosineen soveltuu muovinkeräykseen. Pakkauskar-tonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopi-vuus on laatuvarmennettu.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Etanoli 70 p-%/ 76,9 t-%
Alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi
Aqua ad 100 %

pH n. 7,0

Desinfektol P 100 ml

Tuotenumero: 13240125
Myyntierä: 16 kpl
Lava: 3360 kpl
Lava: 3360 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504596213
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504664479

Desinfektol P 500 ml pumpupullo

Tuotenumero: 13240123
Myyntierä: 10 kpl
Lava: 640 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504251037
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504718790

Desinfektol P 500 ml

Tuotenumero: 13240124
Myyntierä: 12 kpl
Lava: 840 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414500006891
GTIN kuljetuspakkaus: 16414500006898

Desinfektol P 5000 ml

Tuotenumero: 13240132
Myyntierä: 3 kpl
Lava: 108 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504139762
GTIN kuljetuspakkaus: 6414505156287

20220322

Berner Oy

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | +358 20 690 761 | medlab@berner.fi | bernermedlab.fi

BERNER