

Natura[®] HUDSKYDD

ConvaTecs hudskydd har flera unika egenskaper och håller högsta kvalitet i fråga om *säkerhet*, *funktionalitet* och *komfort*. Precis som våra stomipåsar.

• Stomahesive[®] hudskydd för en säker och skonsam bandagering.

• Durahesive[®] hudskydd sväller och skapar en tätande "krage" runt stomin.

• Flexibel häfta – tunn och följsam.

Produktfakta

Stomahesive[®] hudskydd

• Stomahesive[®] har med stor framgång använts som hudskydd för stomiopererade i nära fyrtio år. Materialet består av naturliga ämnen som bland annat pektin och gelatin och ger en vidhäftning som är dokumenterat skonsam och säker. Pektinet bidrar också till det naturliga hudskyddet genom att sänka pH-värdet på huden.¹ Stomahesive[®] har förmågan att absorbera fukt från huden utan att vidhäftningen försämras. Materialet är mycket hudvänligt.

Durahesive[®]

• Durahesive[®] är en vidareutveckling av det klassiska hudskyddet Stomahesive[®]. Durahesive[®] är särskilt framtaget för ileostomier och urostomier och kan

absorbera flytande utsöndringar utan försämrad vidhäftning. Dessutom sväller plattan långsamt när den absorberar fukt och bildar en "krage" runt stomin, som dels förebygger erosion av plattan, dels skyddar den peristomala huden.

Flexible hudskyddsplattor

- Flexible med akrylathäfta rekommenderas när man vill använda plattan mer än tre dagar i sträck.
- Flexible med hydrokolloid häfta när man vill byta 2-3 gånger/vecka.

Standard hudskyddsplatta

- Rekommenderas när den peristomala huden är extra känslig.

Förvaring

- Stomiplattor ska förvaras torrt och i rumstemperatur. Undvik kyla och hög luftfuktighet.

Hållbarhet

- Fem år från tillverkningsdatum.

Klassificering

- Produkterna är CE-märkta och uppfyller relevanta miljö- och säkerhetskrav.


Avfallshantering

- Följ lokala anvisningar. Vid bruk i hemmet paketeras allt stomimateriel omsorgsfullt och kastas i hushållsavfallet. Innehållet i påsen kan vid behov först tömmas i toaletten.

Bruksanvisning


Förberedelser

1. Rengör huden runt stomin med en mild tvål och ljummet vatten. Skölj och torka väl.
2. Mät stomins diameter och välj en lämplig hudskyddsplatta.
3. Rita upp stomins diameter på plattan och klipp upp hålet precis utanför den ritade linjen med hjälp av en böjd sax.

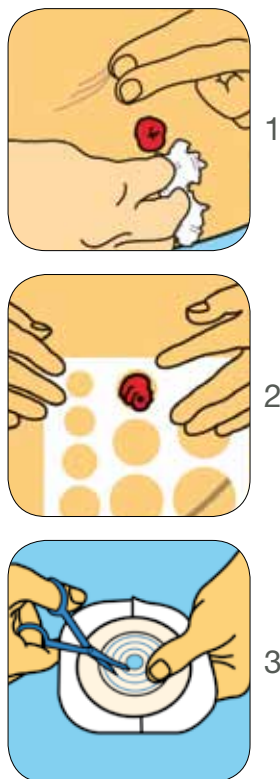

Applicera/ta bort plattan

1. Ta bort skyddsfilmen från hudskyddsplattan.
2. Fäst hudskyddsplattan och massera fast plattan i 30 sekunder. Var extra noga med området närmast stomin.
3. Ta bort det vita skyddspappret från den vita häftan. Tryck fast mot huden, jämna ut eventuella rynkor.
4. **Ta bort:** När du skall ta bort bandaget lossar du försiktigt hudskyddsplattan från huden samtidigt som du trycker lätt på huden med den andra handen. Om hudskyddet sitter hårt kan du försiktigt lossa den med en fuktig kompress.

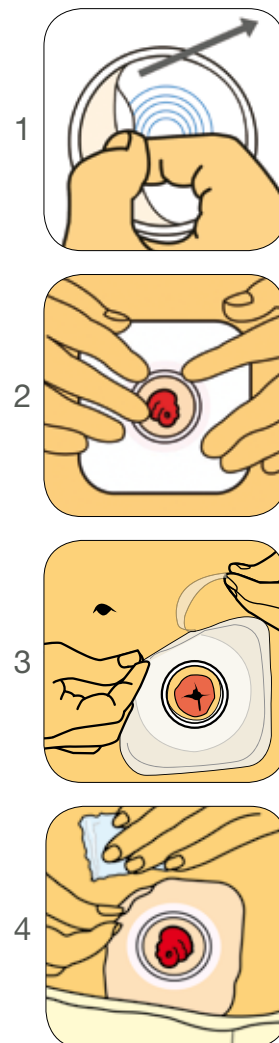

Varunummer

▲ För utförlig information se bruksanvisningen i förpackningen.

10 st/tp	Ringstorlek mm	ConvaTec-kod	Svenskt vnr
Natura® Durahesive® hudskyddsplatta	38	413154	731488
	45	413155	731489
	57	413156	731490
	70	413157	731491
Natura® Stomahesive® hudskyddsplatta	38	401574	731492
	45	401575	731493
	57	401576	731494
	70	401577	731495
Natura® Stomahesive® Flexible hudskyddsplatta med akrylathäfta, beige	38	125263	731496
	45	125264	731497
	57	125265	731498
	70	125266	731499
Natura® Stomahesive® Flexible hudskyddsplatta med hydrokolloid häfta, vit	38	410294	731500
	45	410295	731501
	57	410296	731502
	70	410297	731503

© 2012 ConvaTec Inc.
Symbolerna ®/™ anger
varumärken tillhörande
ConvaTec Inc.



ConvaTec