



Natura[®] Moldable HUDSKYDD

ConvaTecs hudskydd har flera unika egenskaper och håller högsta kvalitet i fråga om *säkerhet*, *funktionalitet* och *komfort*. Precis som våra stomipåsar.

Durahesive[®] hudskydd för en säker och skonsam bandagering. Sväller och skapar en tätande "krage" runt stomin.

Moldable kan formas kring de flesta stomier, även de mest oregelbundna, i en perfekt och följsam passform.

Stomahesive[®] hudskydd för en säker och skonsam bandagering.

Produktfakta

Stomahesive[®] hudskydd

● Stomahesive[®] har med stor framgång använts som hudskydd för stomioopererade i nära fyrtio år. Materialet består av naturliga ämnen som bland annat pektin och gelatin och ger en vidhäftning som är dokumenterat skonsam och säker. Pektinet bidrar också till det naturliga hudskyddet genom att sänka pH-värdet på huden.¹ Stomahesive[®] har förmågan att absorbera fukt från huden utan att vidhäftningen försämras. Materialet är mycket hudvänligt.

Durahesive[®]

● Durahesive[®] är en vidareutveckling av det klassiska hudskyddet Stomahesive[®]. Durahesive[®] är särskilt framtaget

för ileostomier och urostomier och kan absorbera flytande utsöndringar utan försämrade vidhäftning. Dessutom sväller plattan långsamt när den absorberar fukt och bildar en "krage" runt stomin, som dels förebygger erosion av plattan, dels skyddar den peristomala huden.

ConvaTec Moldable Technology[™]

● Moldable-plattan kräver varken mallar, mätning eller tillklippning vid applicering. Hålet formas med fingrarna till en tät passning runt stomin. Materialets inbyggda elasticitet är ett materialminne (Rebound Memory Technology[™]) som följer stomins rörelser så att materialet skonsamt kramar om stomin och ger en säker tätning. Materialets svällande egenskaper bidrar aktivt till tätningen.

Förvaring

● Stomiplattor ska förvaras torrt och i rumstemperatur. Undvik kyla och hög luftfuktighet.

Hållbarhet

● Fem år från tillverkningsdatum.

Klassificering

● Produkten är CE-märkt och uppfyller relevanta miljö- och säkerhetskrav.

Avfallshantering


● Följ lokala anvisningar. Vid bruk i hemmet paketeras allt stomimateriel omsorgsfullt och kastas i hushållsavfallet. Innehållet i påsen kan vid behov först tömmas i toaletten.

Bruksanvisning


1. Rengör huden runt stomin med en mild tvål och ljummet vatten. Skölj och torka väl.

2. När du använder en ConvaTec Moldable Technology™ hudskyddsplatta formar du enkelt öppningen till storleken och formen på din stomi. Innan du tar bort den klara skyddsfilmen på baksidan, placerar du tummarna (eller fingrar) i mitten av starthålet och börja rulla hudskyddsmaterialet bakåt. Dra eller sträck inte i materialet för att göra den större, rulla den. När du har skapat en öppning i storlek av din stomi, trycker du försiktigt ihop den rullade kanten så att den en kort stund håller formen.

Förberedelser

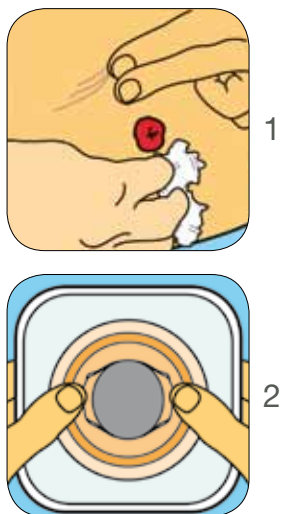

Applicera/ta bort plattan

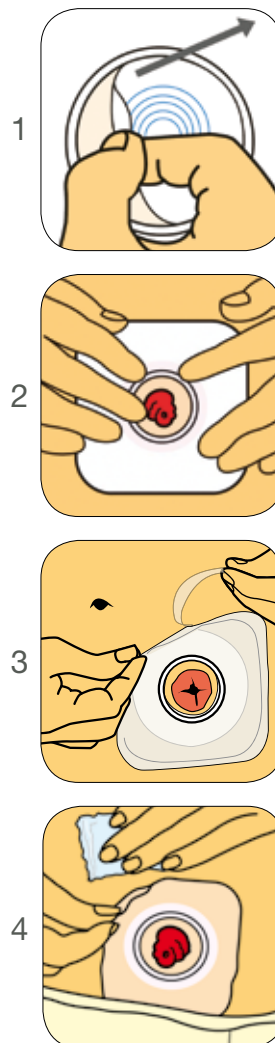

1. Ta bort skyddsfilmen från hudskyddsplattan.

2. Fäst hudskyddsplattan och rulla vid behov tillbaka det formbara materialet mot stomin och massera fast plattan i 30 sekunder. Var extra noga med området närmast stomin.

3. Ta bort det vita skyddspappret från den vita häftan. Tryck fast mot huden, jämna ut eventuella rynkor.

4. Ta bort: När du skall ta bort bandaget lossar du försiktigt hudskyddsplattan från huden samtidigt som du trycker lätt på huden med den andra handen. Om hudskyddet sitter hårt kan du försiktigt lossa den med en fuktig kompress.

▲ För utförlig information se bruksanvisningen i förpackningen.

Varunummer

© 2012 ConvaTec Inc. Symbolerna ®/™ anger varumärken tillhörande ConvaTec Inc.

	Ringstorlek mm	ConvaTec-kod	Svenskt vnr
Natura® Durahesive® Moldable, formbar hudskyddsplatta med hydrokolloid häfta (10 st/fp)	45/13-22	411800	731480
	45/22-33	411802	731481
	57/33-45	411804	731482
	70/45-56	411806	731483
Natura® Stomahesive® Moldable, formbar hudskyddsplatta med hydrokolloid häfta (10 st/fp)	45/13-22	411801	731484
	45/22-33	411803	731485
	57/33-45	411805	731486
	70/45-56	411807	731487