

Diversey™

Oxivir Plus

Pesevä desinfektioaine

Kuvaus tuotteesta

Oxivir Plus on pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinnällisten välineiden ja laitteiden, vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfiointiin sekä eritetahradesinfiointiin.

Ominaisuudet

- Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni. Laaja mikrobisidinen teho.

Edut

- Turvallinen ja helppo käyttää. Puhdistaa ja desinfioidi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa. Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfiointiin puhdistukseen terveydenhuollon vaativissa kosteissa-, lämpimissä- ja keittiötiloissa.
- Tavanomaisiin desinfektionaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi. Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus. Mikrookuitupyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa. Kestää likarastusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa. Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja. Ehkäisee kalkkikiven muodostusta. Soveltuu tekstiilipintojen desinfiointiin puhdistukseen. Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin.

Käyttöohje ja annostus


Tee käyttöliuos viileään veteen. Mittaa ensin vesi ja lisää sen jälkeen Oxivir Plus.

- **Pintadesinfektio, puhtaat pinnat:** 10 ml + 990 ml vettä (1 %). Pyyhi pinta huolellisesti käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä. **Pintadesinfektio, likaiset pinnat:** 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Märkäpyyhintä tai kosteapyyhintä. Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä. **Pintadesinfektio (cl.diff.):** 150 ml + 850 ml vettä (15 %)
- **Eritetahradesinfektio:** 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Levitä liuos tahraan ja pyyhi tahra pois.
- **Tekstiilipintojen desinfiointi puhdistus:** 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Poista irtolika tai erite. Annostele liuosta suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahrann keskusta kohden. Imeytä liuennut tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhtelee pinta lopuksi vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.

CE
0044

AHP®
Patented

WOOLSAFE
APPROVED

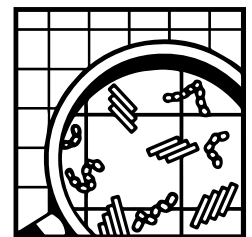

© A.I.S.E.



Oxivir Plus

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas, kellertävä neste

Tuoksu: hajusteeton

pH-arvo, laimentamaton: < 2

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Käytä suojakäsineitä! Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa.

Säilyvyys

2 vuotta

Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

Valmiin käyttöliuoksen määrä

Tiivisteiden määrä: 1 litra **Pitoisuus:** 3,5% **Valmista käyttöliuosta:** 29 litraa

Tiivisteiden määrä: 5 litraa **Pitoisuus:** 3,5% **Valmista käyttöliuosta:** 143 litraa