

EMÄKSISTÄ PUHDISTUSTEHOA VÄLINEHUOLTOON

Aniosyme Synergy WD Plus

MONOENTSYMAATTINEN EMÄKSINEN PESUAINE TEHOKKAASEEN PUHDISTUKSEEN

Aniosyme Synergy WD Plus on emäksinen, nestemäinen pesuaine, joka takaa puhdistustehon instrumenttien automaattisessa uudelleenkäsittelyssä. Sen erityinen monoentsyymaattinen, silikaatiton koostumus takaa erinomaisen puhdistustehon ja materiaaliyhteensopivuuden taloudellisina pitoisuuksina.

- **VOIMAKAS** - Emäksistä puhdistustehoa; pH-taso > 10
- **ENTSYMAATTINEN** - Tehoa kaikentylaiseen likaan
- **TEHOKAS** - pH-taso yli 10 kaikilla vesilaaduilla



Aniosyme Synergy WD Plus

Monoentsyymaattinen emäksinen pesuaine tehokkaaseen puhdistukseen



Aniosyme Synergy WD Plus
5 litran kanisteri

VOIMAKAS

Emäksistä puhdistustehoa; pH-taso > 10 - täyttää RKI-vaatimukset.

ENTSYMAATTINEN

Poistaa kaikenlaisen lian, erityinen silikaatiton monoentsyymaattinen koostumus mahdollistaa joustavan annostuksen.

TEHOKAS

Erinomainen puhdistusteho osoitettu alhaisilla 0,3-1 %:n pitoisuuksilla.

KEMIAALLISET JA FYSIKAALLISET TIEDOT

• Tiheys	20°C	1,152 g/mL
• pH-arvo* (tiiviste)	20°C	10,0
• pH-arvo* 0,3 %:n pitoisuudella (liuos, 3 ml/l deionisoitua vettä)	20°C	10,9
• pH-arvo* 1 %:n pitoisuudella (liuos, 10 ml/l deionisoitua vettä)	20°C	11,0
• Johtavuus 0,3 %:n pitoisuudella (liuos, 3 ml/l deionisoitua vettä)	20°C	515 µS/cm
• Johtavuus 1 %:n pitoisuudella (liuos, 10 ml/l deionisoitua vettä)	20°C	1412 µS/cm
• Viskoosisuus (tiiviste)	20°C	< 15 mPa/s

*pH-arvo mitataan käyttöolosuhteissa aina pH-mittarilla, lämpötilakompensaatio huomioiden.

ORDERING INFORMATION

TUOTE	PAKKAUSYKSIKKÖ	TILAUSKOODI
Aniosyme Synergy WD Plus	2 x 5 litran kanisteri	3100860
Aniosyme Synergy WD Plus	1 x 200 litran tynnyri	3100890



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Jakelija:
OY ECOLAB AB
Palkkatilanportti 1
00240 Helsinki
Suomi

KÄYTTÖALUE

Monoentsyymaattinen pesuainetiiviste instrumenttien uudelleen käsittelyyn. Kirurgisten ja lääkinällisten välineiden ja laitteiden puhdistus automaattisissa pesu-/desinfiointilaitteissa ja pesutunneleissa.

KÄYTTÖOHJEET

- Ammattikäyttöön tarkoitettu tiivisteliuos.
- Tarkoitettu käytettäväksi automaattipesureissa ja pesutunneleissa 0,3-prosenttisena liuoksena. Pitoisuus voidaan tarvittaessa nostaa 1 prosenttiin.
- Vaikutus 1 minuutista alkaen.
- Mukauta pitoisuus, kontaktiaika ja laimennuksessa käytettävän veden lämpötila puhdistettavien välineiden likaisuuteen ja käytettävään puhdistusmenetelmään ja puhdistusvaiheen pH-tavoitetasoon.
- Enimmäislämpötila: 60 °C.

AINESOSAT

Ei-ioniset pinta-aktiiviset aineet, sekvestrausaine, entsyymikompleksi (proteasi), apuaineet.

SÄILYTYS


Vaarallinen aine - noudata käytössä varotoimia (laadittu Euroopan unionin voimassa olevien kemiallisten tuotteiden luokittelua ja merkintöjä koskevien säännösten mukaisesti). Säilytyslämpötila: +5-+25 °C.

SERTIFIKAATIT

Toimitamme sertifikaatit mielellämme pyynnöstä.

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE, KÄYTÄ TURVALLISESTI

Lue merkinnät ja tuotetiedot.

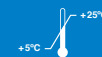

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.