


Mepitel® One

DET EFFEKTIVA SÅRKONTAKTLAGRET

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Endast vidhäftning på en sida för enkel applicering
- Kan sitta kvar i upp till 14 dagar³⁻⁷ vilket ger kostnadseffektiv^{1,8} och ostörd sårläkning

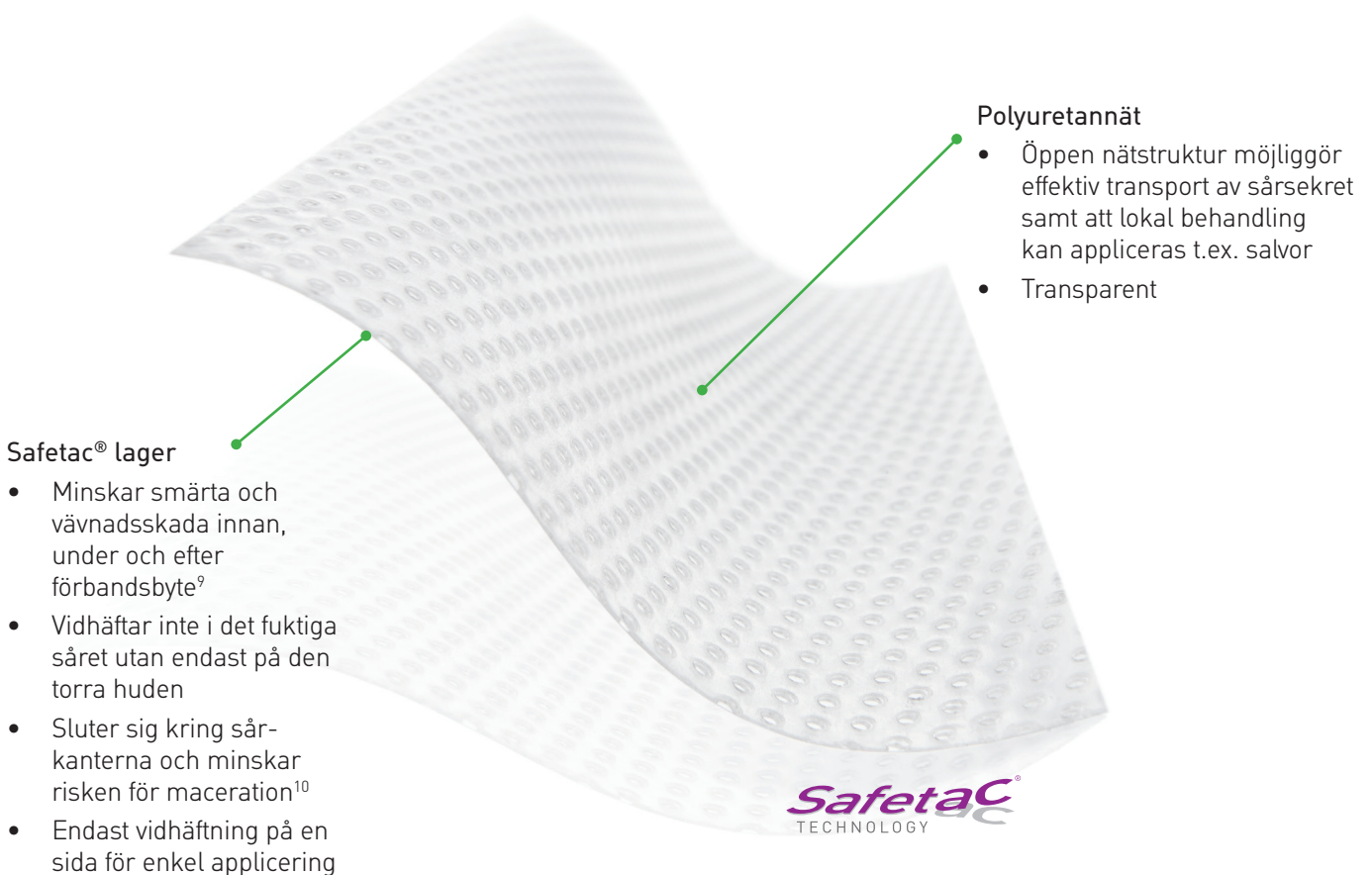


Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information besök www.safetac.se

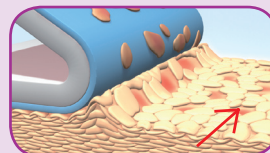


Hudceller dras av med traditionell vidhäftning.

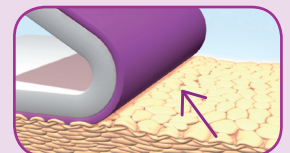


Inga hudceller dras av med Safetac.


Så här används Mepitel® One

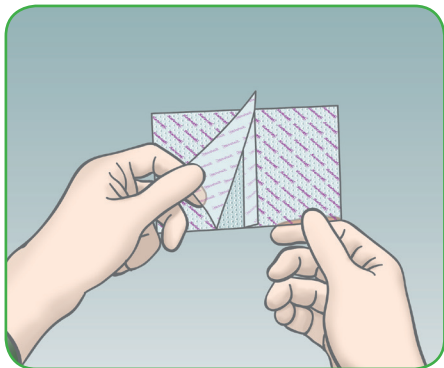

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddspappret.

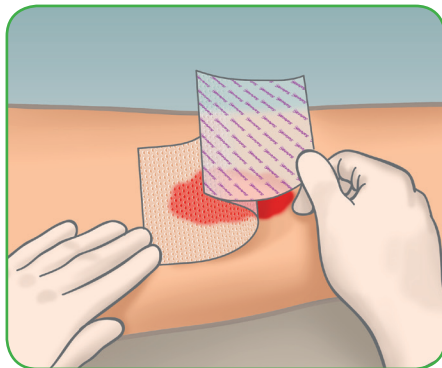

Lägg på Mepitel® One på såret.

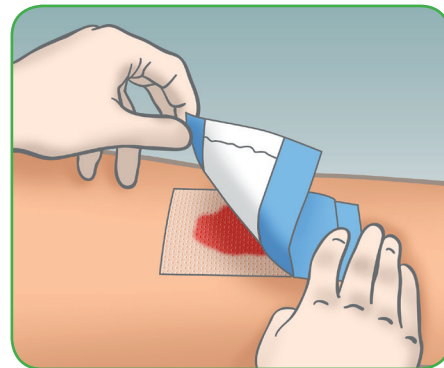

Lägg på ett absorberande ytterband.

Så här fungerar Mepitel® One

Mepitel One kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar³⁻⁷, beroende på sårets tillstånd, vilket möjliggör ostörd sårhäkning. Den öppna nätstrukturen låter sårsekret passera till ett absorberande ytterförband. Safetac förhindrar ytterförbandet från att fastna i såret vilket minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till den omkringliggande huden och minskar risken för maceration.

Fördelar med Mepitel

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbytet
- Endast vidhäftning på en sida för enkel applicering
- Kan sitta kvar på såret i upp till 14 dagar vilket möjliggör ostörd sårhäkning
- Låg bytesfrekvens
- Minskar risken för maceration
- Bibehållna produkttegenskaper över tid - lämnar inga rester och torkar inte ut
- Transparent för att underlätta inspektion av såret vid applicering och under bårtiden
- Följsam och bekväm att bära
- Stannar på plats
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden


Mepitel One kan användas på ett stort antal sår, t.ex. hudflikar, skrubbsår, lacerationssår, blåsor, brännskador, transplantatfixering, diabetiska fotsår, venösa och arteriella bensår, smärtsamma sår. Mepitel One kan även användas som ett skyddslager på torra sår samt på områden med ömtålig hud.

Varning

När Mepitel One används på brännskador som behandlas med meshat transplantat eller efter ansiktsslipningar kan förbandet ge avtryck om det ej används korrekt.

Observera

- Såret bör inspekteras för att upptäcka tecken på infektion i enlighet med klinisk praxis. Rådgör med vårdpersonal för lämplig behandling.
- Om Mepitel One används på patienter med Epidermolysis bullosa (EB), var extra försiktig vid förbandsbyte. Vidhäftningen på Mepitel One är något högre än hos Mepitel.
- När Mepitel One används på brännskador som behandlas med meshat transplantat: undvik att utsätta förbandet för onödigt tryck.
- När Mepitel One används på ansiktsslipningar: undvik att utsätta förbandet för tryck, ta av och sätt på förbandet igen minst varannan dag.
- När Mepitel One används på blödande sår eller sår med segt sårsekret ska det täckas med ett fuktigt absorberande förband.
- När Mepitel One används för transplantatfixering ska förbandet inte bytas före femte dagen efter applicering.

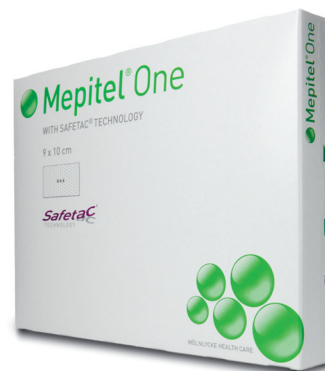

MEPITEL ONE levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek (cm)	Avd fp	Transp fp
289100	5 × 7,5	10	70
289300	7,5 × 10	10	40
289500	10 × 18	10	70
289700	17 × 25	5	40