

3M Hälsovård
Coban™ Lite 2-lagers kompressionssystem



Bara 2 steg

till en effektiv och bekväm
kompression



3M

Coban™ Lite 2-lagers kompressionssystem

Bara 2 steg till effektiv, bibehållen och bekväm kompression

Coban™ Lite 2-lagers kompressionssystem är speciellt framtagen för att ge en reducerad terapeutisk kompression. Samtidigt är Coban Lite 2-lagers kompressionssystem behaglig för patienter som har en nedsatt tolerans för kompressionsbehandling och för patienter med;

- Venösa bensår med blandningsetiologi
- Ankel – arm (ABPI) index lika med eller högre än 0,5
- Nedsatt mobilitet
- Nyordinerad kompressionsbehandling eller där toleransen inte är känd

Coban Lite 2-lagers kompressionssystem ger optimalt dynamiskt arbetstryck, liksom i 3Ms Coban 2-lagers kompressionssystem, men vilotrycket är reducerat med 25%. Coban Lite 2-lagers kompressionssystem består av två latexfria lindor. De två lindorna fäster i varandra vilket minskar risken för att de skall glida ned samt bildar ett tunt, lätt och effektivt kompressionsbandage som kan bäras upp till 7 dagar.

Steg 1: Inre lager - Komfortlager

- Laminat av polyuretan och Coban
- Appliceras med skumsidan mot huden
- Absorberande, mjukt och bekvämt
- Håller lindan på plats mot huden
- Ersätter polster



Steg 2: Yttre lager - Kompressionslager

- Modifierad Coban
- Ger en effektiv bibehållen kompression i 7 dagar
- Fäster mot det inre lagret och bildar en tunn och lätt profil



- Effektiv
- Lätt att applicera
- Tunn och behaglig
- Patienten kan ha sina vanliga skor
- Sitter i 7 dagar
- Latexfri

Lätt att applicera

- Minskad tid går åt till applicering, då det endast är 2 lager att applicera.
- En förenklad appliceringsteknik - kompressionslagret lindas med full sträckning, inga mått att hålla reda på.
- De två kohesiva lindorna fäster i varandra och ingen extra fixering behövs för att hålla lindorna på plats.

Tunn och bekväm kompression

- När lindorna applicerats blir kompressionsbandaget signifikant tunnare än traditionella 4-lagers system.
- Kompressionen blir smidig och lätt.
- Tillåter patienterna att ha sina vanliga skor.
- Låter patienten bibehålla sin rörlighet och sociala aktiviteter.

Indikation: Är lämplig att användas på patienter med nedsatt tolerans för kompression. Coban Lite 2-lagerskompressionssystem är lämplig att använda på patienter med ett ABPI > 0,5

3M Art nr	Produkt	Antal / fp	Antal fp / leverans fp
2794E	Coban Lite 2-lagers kompressionssystem	1 kit	8 kit