

## evercare<sup>®</sup> inLine 3-tiehana, 2 neulatonta liitintä, jatkoletku, PVC-vapaa

REF: 10575-02, 10625

evercare<sup>®</sup> inLine 3-tiehana on laaja valikoima erilaisiin tarpeisiin. 3-tiehana eripituisilla jatkoletkuilla ja mahdollistaa yhdistämisen kahteen infuusio- ja/tai injektio- lähteeseen tai näiden yhdistelmään. Sulkuhanat ovat steriilejä kertakäyttötuotteita, joiden avulla nesteitä lääkkeitä annetaan suonensisäisesti infuusio- ja perfuusiolaitteen avulla. Ne mahdollistavat kahden infuusiolähteen yhdistämisen infuusiolaitteeseen, josta on verisuoniyhteys.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Neulaton liitin
- ▶ MicroClave Clear
- ▶ Voidaan aktivoida jopa 700 kertaa
- ▶ Lipidiresistentti
- ▶ 45° napsautustoiminto
- ▶ Tuotteet kestävät jopa 2 baarin nestepaineen
- ▶ Pyörivä luer lock-liitin




Tuotenumero	Kuvaus	Koko letku sisä/ulko läpimitta P(pituus)	Täyttövolyyymi (ml)	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
10575-02	3-tiehana, 2 neulatonta liitintä, jatkoletku, PVC-vapaa	Ø 3/4,1 mm, L 10cm	1	25 / 100
10625	3-tiehana, 2 neulatonta liitintä, jatkoletku, PVC-vapaa	Ø 3/4,1 mm, L 100cm	6.8	25 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.

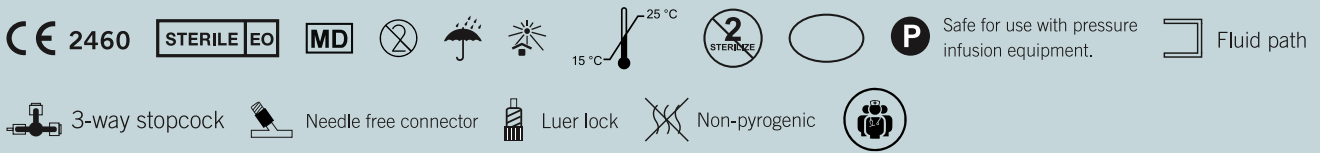

<b>REACH-asetus:</b>	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
<b>Biologinen arviointi:</b>	EN ISO 10993-01
<b>Lakisääteiset vaatimukset:</b>	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
<b>Tuotestandardien vaatimukset:</b>	EN 8536-9, EN ISO 80369-7
<b>Laatustandardit:</b>	EN ISO 13485
<b>Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:</b>	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Koiras luer korkki	HDPE, valkoinen
3-tiehana	Läpinäkyvä kanava PC, Lipidinkestävä, valkoinen kahva HDPE
Neulaton liitin	PC+Silikoni, Läpinäkyvä
Letku	Polyolefiiniseos (PVC-vapaa), pehmeä, asia selvä, kiertymisen kestävä
Pyörivä luer lock	ABS & PC, Läpinäkyvä
irrota täyttökorkki	HDPE, vaaleansivaaaleansininen

## Varoitukset ja suositukset

### Varoitukset

Tämän tuotteen käyttö on rajoitettu laillistetuille lääkäreille tai hoitajille. Lue ohjeet ennen käyttöä. Laitetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Tuote on steriili ja pyrogeeni-vapaa, mikäli yksittäispakkausta ei ole avattu tai se on vahingoittumaton. Älä käytä, mikäli pakkaus/tuote on vahingoittunut tai korkki on löystynyt/irronnut. Älä kiristä Luer-liitintä kitkakohdan yli, sillä se voi vaurioittaa sekä liitintä että yhdistäjää. Älä käytä mitään instrumentteja letkun tai Luer-kiristimen kiinnittämiseen. Tuotteen käyttäminen uudelleen voi johtaa infektiin tai muuhun sairauteen/vaurioon. Ne pas laisser les orifices d'entrée/pavillons exposés. Si nécessaire, remplacer les embouts terminaux stériles.

### Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

### Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

### Käyttöikä

5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	10575-02: 140 x 80 10625: 235 x 100
Rasia	PP	305 x 460 x 0
Kuljetuspakkaus	TCF laatu, Kartonki	10575-02: 310 x 270 x 192 10625: 400 x 295 x 287
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
10575-02	06438129124842	N/A	06438129524840
10625	06438129122831	N/A	06438129522839

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.