

evercare® kynäneulat


















REF: 1972905, 1972906, 1972908, 1973005, 1973006, 1973008, 1973104, 1973105, 1973106, 1973108, 1973204, 1973205, 1973206, 1973208, 1973304, 1973305, 1973306

Evercare®-kynäneulat ovat kertakäyttöisiä insuliinineuloja, joita käytetään yhdessä insuliinikynän kanssa insuliinin itselääkitykseen tyypin I diabeetikoilla. Litteä neulanpohja on uusi muotoilu, joka tarjoaa suuremman ihokosketusalueen ja voi parantaa potilaan mukavuutta insuliinin pistämisen aikana. Ulkosuojassa on litteä yläosa, joten se voi seistä ylösalaisin, ja suojan voi asetetaan takaisin neulan päälle, jotta vältetään tahattomat neulan aiheuttamat vammat injektion jälkeen. Litteä neulanpohja vähentää lihakseen annettavan injektion riskiä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pienempi lihaksensisäisten (IM) injektoiden riski
 - ▶ Litteä neulanpohja vähentää käytetyn painevoiman aiheuttamaa vaihtelua injektion syvyydessä, mikä vähentää lihakseen annettavan injektion riskiä.
- ▶ Mukavampi injektiokokemus
 - ▶ Sileä ja litteä neulanpohja laajentaa kosketusaluetta ihon kanssa parantaen injektion mukavuutta.
- ▶ Pienempi riski tahattomalle neulanpistovammalle
 - ▶ Ulkosuojaus voi seistä vakaasti ylösalaisin, mikä helpottaa käytetyn neulan asettamista takaisin suojukseen tahattoman neulanpistovamman välttämiseksi.
- ▶ Helppokäyttöisempi
 - ▶ Leveämpiin ulko- ja sisäsuojuksiin on helpompi tarttua ja poistaa ne, erityisesti ikääntyneiden.




Tuotenumero	Kuvaus	Värikoodi	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
1972905	evercare® kynäneulat (29G)		0.33mm (29G) X 5 mm	100 / 5000
1972906	evercare® kynäneulat (29G)		0.33mm (29G) X 6 mm	100 / 5000
1972908	evercare® kynäneulat (29G)		0.33mm (29G) X 8 mm	100 / 5000
1973005	evercare® kynäneulat (30G)		0.30mm (30G) X 5 mm	100 / 5000
1973006	evercare® kynäneulat (30G)		0.30mm (30G) X 6 mm	100 / 5000
1973008	evercare® kynäneulat (30G)		0.30mm (30G) X 8 mm	100 / 5000
1973104	evercare® kynäneulat (31G)		0.25mm (31G) X 4 mm	100 / 5000
1973105	evercare® kynäneulat (31G)		0.25mm (31G) X 5 mm	100 / 5000
1973106	evercare® kynäneulat (31G)		0.25mm (31G) X 6 mm	100 / 5000
1973108	evercare® kynäneulat (31G)		0.25mm (31G) X 8 mm	100 / 5000
1973204	evercare® kynäneulat (32G)		0.23mm (32G) X 4 mm	100 / 5000
1973205	evercare® kynäneulat (32G)		0.23mm (32G) X 5 mm	100 / 5000
1973206	evercare® kynäneulat (32G)		0.23mm (32G) X 6 mm	100 / 5000
1973208	evercare® kynäneulat (32G)		0.23mm (32G) X 8 mm	100 / 5000
1973304	evercare® kynäneulat (33G)		0.20mm (33G) X 4 mm	100 / 5000
1973305	evercare® kynäneulat (33G)		0.20mm (33G) X 5 mm	100 / 5000
1973306	evercare® kynäneulat (33G)		0.20mm (33G) X 6 mm	100 / 5000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.

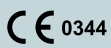

Non-pyrogenic



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-01

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden asetukset (EU) 2017/745, MDR Class IIa

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Neulasäiliö	PP, läpinäkyvä
Neulasuojus	PP, läpinäkyvä
Neulan kärjen	PP, läpinäkyvä
Suojus	SS, 3-vaiheinen viiste
Neulan voiteluaine	Silikonijöljy

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset

Älä käytä uudestaan, kertakäyttöinen.
Älä käytä neuloja joiden suojat puuttuvat tai neula on taipunut tai vaurioitunut.
Käänny lääkärisi puoleen ennen kuin muutat kynäneulan pituuden.
Varoitus! Pidä poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Sisältää pieniä osia.
Neula on steriili, kun sen suojus on ehjä. Kierrä neula irti insuliinikynästä pistoksen jälkeen. Säilytä käytettyjä neuloja erillisessä astiassa.

Säilytys Säilytä neuloja kuivassa ja viileässä sekä erillään kemiallisista aineista.

Hävittäminen Hävitä neulat asuinalueesi jätteidenkäsittelyohjeiden mukaan.

Käyttöikä 5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	
Rasia	Aaltopahvi	130 x 70 x 70
Kuljetuspakkaus	Aaltopahvi	375 x 270 x 375
Pakkausteippi	N/A	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
1972905	N/A	06975100500405	16975100500402
1972906	N/A	06975100500412	16975100500419
1972908	N/A	06975100500429	16975100500426
1973005	N/A	06975100500436	16975100500433
1973006	N/A	06975100500443	16975100500440
1973008	N/A	06975100500450	16975100500457
1973104	N/A	06975100500467	16975100500464

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.