

Corega Ultra Cream 40g



Produktinformation:

Corega Ultra Cream fäster tandprotesen snabbt och har en extra stark häftförmåga och god stötdämpande effekt, så att du kan känna dig trygg och få komfort hela dagen. Corega Ultra Cream är speciellt lämpad för dig som lätt får skavsår i munnen eller har ömtåliga slemhinnor.

Corega Ultra Cream är lätt att applicera och hindrar mat från att tränga in mellan protes och gom.

- Förbered protesen genom att tvätta den noggrant med ljummet vatten. Torka den ordentligt.
- Applicera krämen på protesen i tunna streck eller ett antal prickar - inte för nära protesens kant. Börja med en liten mängd av produkten. För kraftigare fixering: applicera en större mängd.
- Pressa protesen på plats och håll fast den i några sekunder.
- När du tar ut protesen på kvällen, så bör det mesta av fixativkrämen vara upplöst.
- Är det mycket kräm kvar på protesen så kan du i fortsättningen reducera mängden fixativkräm.

EAN: 5000198124446

Varumärke: Corega

Kategori: Mun & Tänder > Tandprotes & Bettskena

Förpackningsstorlek: 40 g