

Schine Pill Box L

Produktbeskrivning

- Smidig öppning och stängning med transparenta jalusiluckor.
- Inga lösa delar.
- Färgad botten.
- Stora fack med rundade hörn.
- Lättillgängligt ordinationskort.
- Uttagbar innerlåda.
- Stapelbar
- Tål maskindisk

Schine Pill Box L erbjuder ett nytt sätt att förvara/dosera tabletter. Med jalusiluckor öppnar och stänger du enkelt, utan besvärande utskjutande delar.

Large är en box med 7x4 fack avsett för en veckas dosering. Dagarna är tydligt markerade och de 4 facken för varje dag är numrerade från 1–4. De är även försedda med symboler för dygnets olika tidpunkter. På boxens undersida förvaras ordinationskortet i en praktisk plastficka.

Boxen är enkel att tömma genom att ta ut den lösa innerlådan. Den kan öppnas, stängas och låsas. Boxen tål maskindisk (gäller ej plastfickan).

Boxarna är stapelbara. Stapellåsen på ovansidan och undersidan håller dem på plats.

Transparenta luckor och färgad botten gör det enkelt att se om facket är fyllt. Schine Pill Box L finns i två färger, röd och blå.

Vi har svenskt patent.

Användartips

- Förvara Schine Pill Box L utom räckhåll för barn.
- Var uppmärksam på om vissa mediciner/tabletter skall förvaras på särskilt sätt.
- Leverantören ansvarar ej för felaktig användning av Schine Pill Box L eller felaktig dosering av medicin.
- Schine Pill Box L kan maskindiskas i övre delen av diskmaskinen (gäller ej plastfickan).
- Vi rekommenderar att rengöra boxen vid byte av medicin.
- Se till att alla delar är torra innan boxen laddas med tabletter.

Tillbehör

Doseringslista, plastficka

Specifikationer

| | |
|-----------|--|
| Vikt: | 190g |
| Längd: | 11,8 cm |
| Bredd: | 19,8 cm |
| Höjd: | 3,2 cm |
| Material: | Återvinningsbar plast |
| Övrigt: | Tål maskindisk i övre delen av diskmaskinen (gäller ej plastfickan). Medicinteknisk produkt, klass 1 |

