

# Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen

Enkeltpakket

Lett å bruke. Pålitelig. Ergonomisk.

Den sterile **Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen** kan festes til et permanent kateter som et alternativ til en urinpose, det gir brukeren mer frihet og diskresjon. Ventilen kan enkelt betjenes med én hånd og kan kobles til ben- og sengeposer.

Etter en urologisk operasjon kan pasienter fortsatt ha et permanent kateter for en kortere eller lengere periode. For å unngå forringelse av blæren (krymping), kan ventilen festes til kateteret på dagtid og sikre normal fylling av blæren og eliminere behovet for en urinpose, pasienten oppnår dermed en normal blærefunksjon og redusere behovet for blærehabilitering.

Tømming av blæren kan da skje med jevne mellomrom på dagtid. På natt kan kateteret festes til en sengepose.

## PRODUKTFUNKSJONER

- ▶ Den patenterte **Q-Flow-ventilen** er enkel, ergonomisk og sikker å betjene med en hånd - også for personer med redusert fingerbehendighet. Når hendelen står i 90° er ventilen helt åpen. Ved 180° er ventilen fortsatt helt åpen og nå plassert i en sikker posisjon uten risiko for å lukke uventet i løpet av natten. På begge posisjoner er en fri flyt sikret.
- ▶ **Q-Flow-ventilen** har en myk silikonslange for enkel tilkobling til en urinpose om natten, noe som reduserer risikoen for infeksjon ved bytte av pose.
- ▶ **Q-Flow-ventilen** sørger for fri flyt av urin på en hygienisk og sikker måte. Hetten minimerer risikoen for kontaminering ved håndtering av ventilen.
- ▶ **Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen** er enkeltpakket med REF-nummer, partinummer og utløpsår/måned trykt på den sterile posen.

Q-Flow-ventilen



## QUFORA<sup>®</sup> Q-FLOW VENTIL

REF	Beskrivelse	Mengde Salgspakning	Mengde Salgspakning	GTIN-14 <sup>1</sup>
21104201	Q-Flow ventil med 5 cm mykt silikonrør	30	300	15710187004754

<sup>1</sup>GTIN strekkodenummer for utsalgsette.

### Importer

Qufora A/S  
Gydevang 28-30  
DK-3450 Allerød  
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92  
info@qufora.com  
www.qufora.com

### Distributor

KvinTo AS  
Wedel Jarlsbergs vei 31  
1358 Jar  
Norge

Tlf: +47 22 72 03 00  
post@kvinto.no  
www.kvinto.no

 **KvinTo AS**  
Medisinske Produkter  
— for bedre livskvalitet

MBH | **qufora**<sup>®</sup>

Qufora<sup>®</sup> is a registered trademark of Qufora A/S. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.

230918\_INO

# Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen

Enkeltpakket

Lett å bruke. Pålitelig. Ergonomisk.

## EGENSKAPER QUFORA<sup>®</sup> STERIL VENTIL

- Q-Flow-ventil med et mykt silikonutløpsrør og free-free flow (utløpsrør: indre diameter: 8,0 mm; lengde: 50 mm)

## MATERIALER

- Q-Flow ventil LLDPE/POM;
- Utløpsrør Silikon
- Cap PE
- Enkeltpose HDPE & PE/PET

Qufora<sup>®</sup>-ventilen er et medisinsk engangsutstyr. **Alle materialer er 100 % lateks- og DEHP-frie.**

## EMBALLASJE

- Utsalgsseske Kartong
- Senderboks Bølgepapp
- IFU Ingen
- Holdbarhet Fem (5) år
- Lagring Tørt i temperaturer mellom 0°C og 35°C; beskyttet mot direkte sollys; fuktighetsnivå maks 80 %; Må ikke bli utsatt for hardt trykk

## STERILISERING

- Gass sterilisert med etylenoksid (EtO)

## PRODUKTKLASSIFISERING

- Medisinsk utstyr i samsvar med MDR 2017/745 i klasse I steril (Is)

## ANVENDT STANDARDER

- ISO 13485 Kvalitetsstyringssystem
- GMDN 31975

### Importer

Qufora A/S  
Gydevang 28-30  
DK-3450 Allerød  
Denmark  
Tel: +45 88 30 05 92  
info@qufora.com  
www.qufora.com

### Distributor

KvinTo AS  
Wedel Jarlsbergs vei 31  
1358 Jar  
Norge  
Tlf: +47 22 72 03 00  
post@kvinto.no  
www.kvinto.no



# Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen

Enkeltpakket

Lett å bruke. Pålitelig. Ergonomisk.

## QUFORA<sup>®</sup> Q-FLOW VENTIL


Qufora<sup>®</sup> Q-flow kateterventilen kan brukes sammen med et permanent kateter når permanent tilkobling til urinpose ikke er ønsket eller hensiktsmessig.

Qufora<sup>®</sup> Q-Flow kateterventilen sikrer fri flyt og er enkel å håndtere også for personer med redusert styrke og håndmobilitet.




### LUKKET

- ▶ Koblingen sørger for en sikker forbindelse mellom kateter og ventil
- ▶ Ventilen passer for alle vanlige urologiske katetre
- ▶ Den flate utformede Qufora<sup>®</sup> Q-Flow ventilen sørger for diskresjon

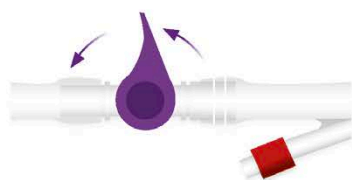

### HELT ÅPEN PÅ 90-180

- ▶ Ventilen sikrer fri strøm av urin mellom 90° og 180° innstilling
- ▶ Ventilen er enkel å betjene i 90°-posisjonen uten kommer i kontakt med utløpet

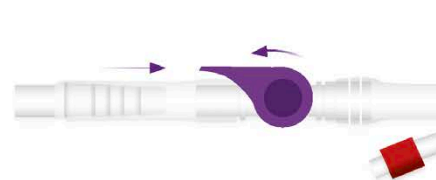

### NATTPOSISJON

- ▶ Qufora<sup>®</sup> Q-Flow-ventilen har et mykt silikonrør og er enkel å koble til en urinpose eller kateter
- ▶ Ved en 180°-innstilling er ventilen helt åpen. 180°-innstillingen sørger for at ventilen ikke lukke utilsiktet i løpet av natten